
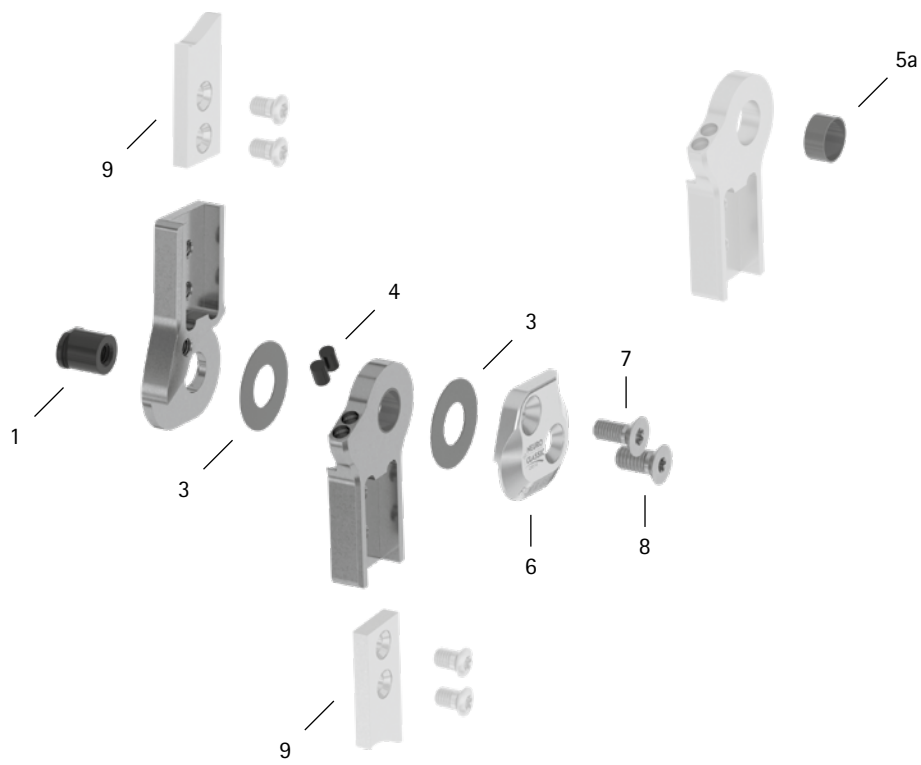


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

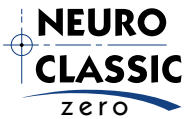

Pos.	12 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB8559-L0840	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	GS1609-040	dischetto di slittamento, Ø = 16 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
3	GS1609-045					
3	GS1609-050					
3	GS1609-055					
3	GS1609-060					
4	PN1000-L05/5	ammortizzatore dell'arresto di estensione	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5a	BP1009-L050	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6	SJ0151-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale, alluminio	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6	SJ0151-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale, alluminio				
7	SC1404-L12	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
8	SC1405-L12	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)				
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
9	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

WP0070-IT-2024-04