


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

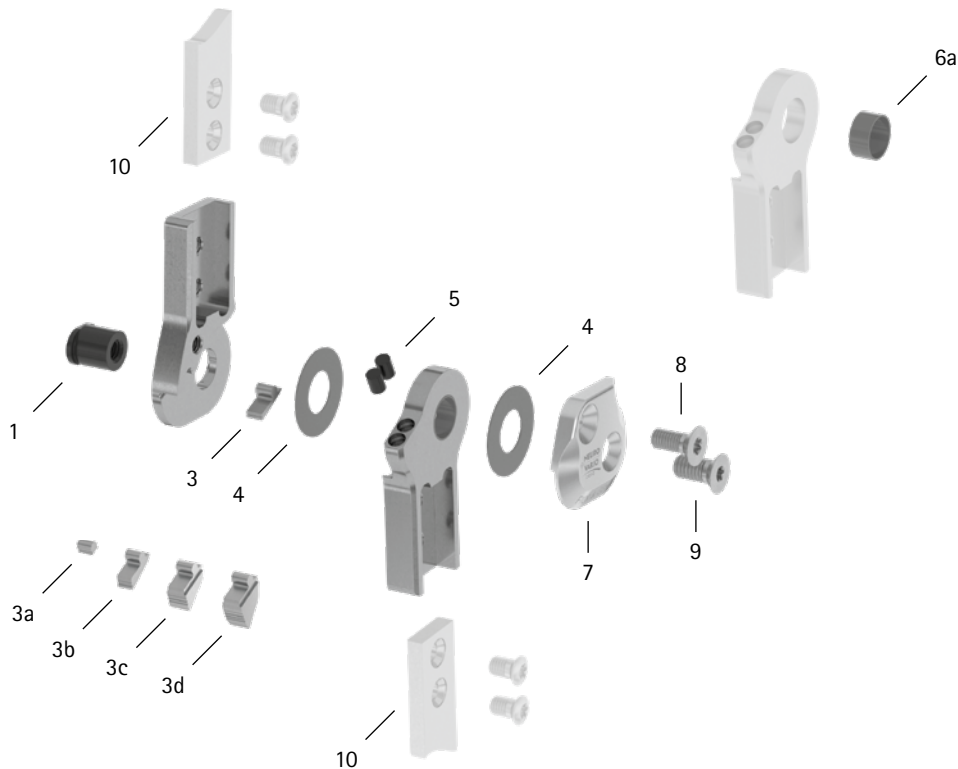

Pos.	12 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB8559-L0840	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3a	SJ9021-E000	arresto di estensione 0°	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
3	SJ9021-E005	arresto di estensione 5°				
3b	SJ9021-E010	arresto di estensione 10°				
3c	SJ9021-E020	arresto di estensione 20°				
3d	SJ9021-E030	arresto di estensione 30°				
4	GS1609-040	dischetto di slittamento, Ø = 16 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
4	GS1609-045					
4	GS1609-050					
4	GS1609-055					
4	GS1609-060					
5	PN1000-L05/5	ammortizzatore dell'arresto di estensione	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6a	BP1009-L050	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7	SJ0191-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale, alluminio	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
7	SJ0191-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale, alluminio				
8	SC1404-L12	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
9	SC1405-L12	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)				
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
10	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente