


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

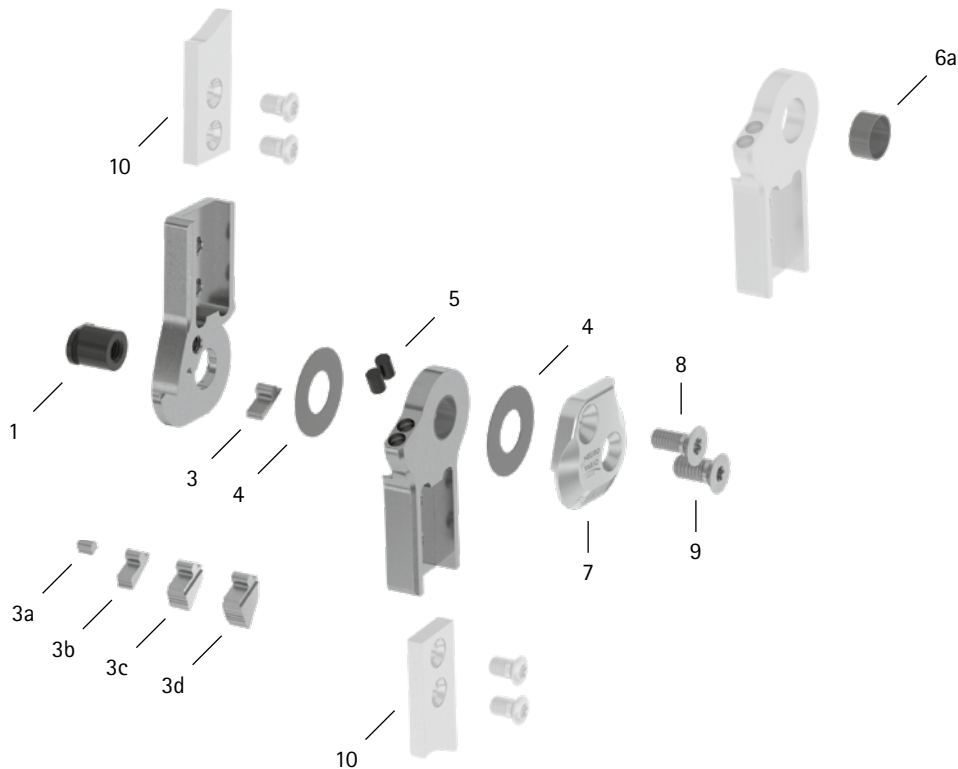

Pos.	14 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB9669-L0840	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3a	SJ9022-E000	arresto di estensione 0°	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
3	SJ9022-E005	arresto di estensione 5°				
3b	SJ9022-E010	arresto di estensione 10°				
3c	SJ9022-E020	arresto di estensione 20°				
3d	SJ9022-E030	arresto di estensione 30°				
4	GS1910-040	dischetto di slittamento, Ø = 19 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
4	GS1910-045					
4	GS1910-050					
4	GS1910-055					
4	GS1910-060					
5	PN1000-L05/5	ammortizzatore dell'arresto di estensione	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6a	BP1110-L050	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7	SJ0192-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale, alluminio	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
7	SJ0192-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale, alluminio				
8	SC1405-L12	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
9	SC1405-L12	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)				
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
10	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente