


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

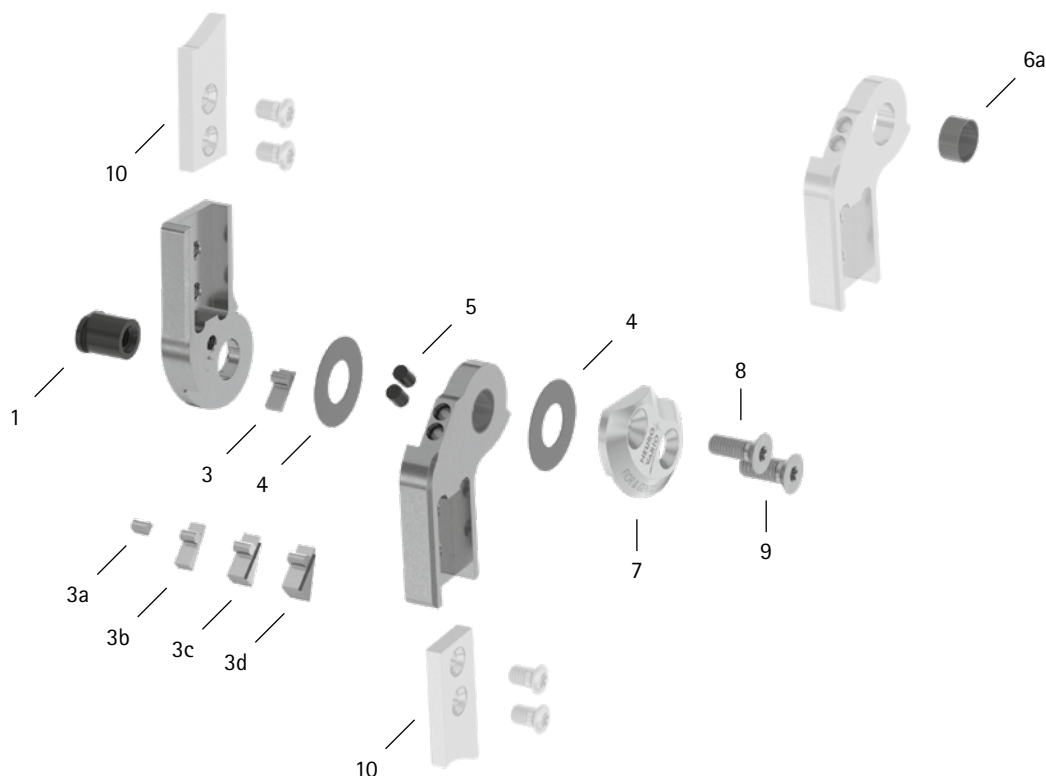

Pos.	20 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB1069-L1220	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3a	SJ9025-E000	arresto di estensione 0°	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
3	SK9525-E005	arresto di estensione 5°				
3b	SK9525-E010	arresto di estensione 10°				
3c	SK9525-E020	arresto di estensione 20°				
3d	SK9525-E030	arresto di estensione 30°				
4	GS2611-040	dischetto di slittamento, Ø = 26 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
4	GS2611-045					
4	GS2611-050					
4	GS2611-055					
4	GS2611-060					
5	PN1000-L05/5	ammortizzatore dell'arresto di estensione	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6a	BP1211-L060	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7	SK0195-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale, alluminio	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
7	SK0195-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale, alluminio				
8	SC1405-L14	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
9	SC1406-L14	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)				
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
10	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

WP0083-IT-2024-04