
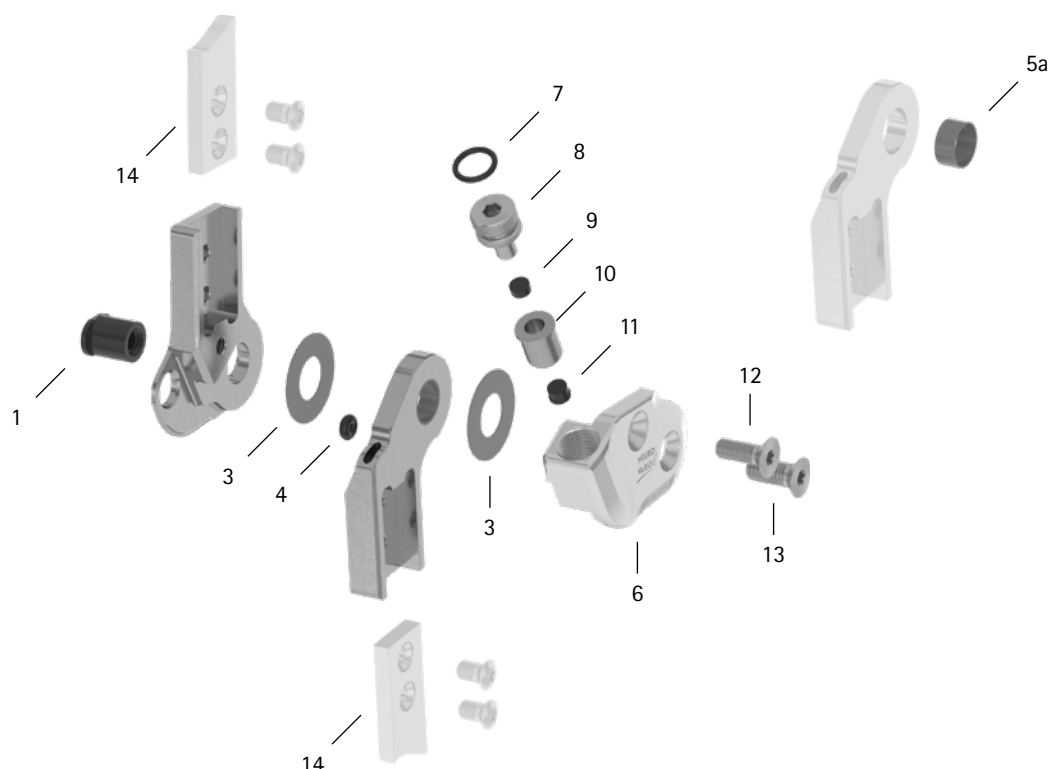


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

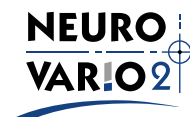

Pos.	20 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB1069-L1220	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	GS2611-040	dischetto di slittamento, Ø = 26 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
3	GS2611-045					
3	GS2611-050					
3	GS2611-055					
3	GS2611-060					
4	VE3771-012/26	O-ring ammortizzatore	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5a	BP1211-L060	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6	SL0265-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale, alluminio**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6	SL0265-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale, alluminio**				
7	VE3771-09/15	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	PN0006-L02	ammortizzatore dell'arresto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
11	SL0285-06	arresto di estensione**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
12	SC1405-L14	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
13	SC1406-L14	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
6-13	SL2935-L	unità funzionale modularità plug + go, sinistra laterale o destra mediale***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6-13	SL2935-R	unità funzionale modularità plug + go, sinistra mediale o destra laterale***				
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
14	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente