


Commissione del paziente/ID della configurazione \_\_\_\_\_

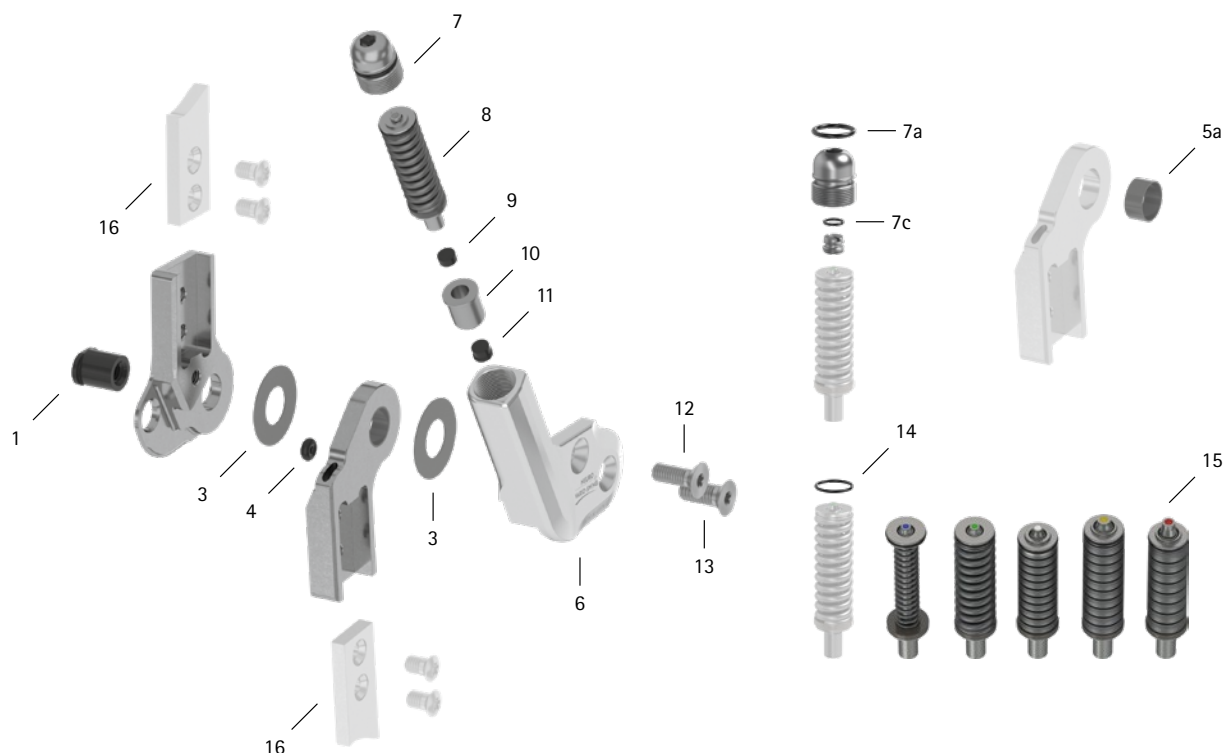

| Pos.                          | 20 mm         | Descrizione                                                                  | Possibile problema         | Misura     | Controllo raccomandato, event. sostituzione* | Sostituzione successiva dopo |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Articolazione modulare</b> |               |                                                                              |                            |            |                                              |                              |
| 1                             | SB1069-L1220  | dado testa ovale                                                             | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 3                             | GS2611-040    | dischetto di slittamento, Ø = 26 mm                                          | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 3                             | GS2611-045    |                                                                              |                            |            |                                              |                              |
| 3                             | GS2611-050    |                                                                              |                            |            |                                              |                              |
| 3                             | GS2611-055    |                                                                              |                            |            |                                              |                              |
| 3                             | GS2611-060    |                                                                              |                            |            |                                              |                              |
| 4                             | VE3771-012/26 | O-ring ammortizzatore                                                        | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 5a                            | BP1211-L060   | boccola scorrevole                                                           | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 6                             | SL0265-L/AL   | piastra di copertura, sinistra lat. o destra med., alluminio**               | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 6                             | SL0265-R/AL   | piastra di copertura, sinistra med. o destra lat., alluminio**               |                            |            |                                              |                              |
| 7a                            | VE3771-11/15  | O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**                  | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 7c                            | VE3771-04/10  | O-ring per fissare la vite di limitazione del movimento**                    |                            |            | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 9                             | PN0006-L02    | ammortizzatore dell'arresto**                                                | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 11                            | SL0285-06     | arresto di estensione**                                                      | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | secondo necessità            |
| 12                            | SC1405-L14    | vite a testa svasata con cava esalobata**                                    | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 13                            | SC1406-L14    | vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**                   |                            |            |                                              |                              |
| 6-13                          | SL2955-L      | unità funzionale modularità plug + go, sinistra laterale o destra mediale*** | perdita di funzione, usura | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 6-13                          | SL2955-R      | unità funzionale modularità plug + go, sinistra mediale o destra laterale*** |                            |            |                                              |                              |

Commissione del paziente/ID della configurazione \_\_\_\_\_



| Pos.                                  | 20 mm              | Descrizione                                                         | Possibile problema                                                             | Misura                                                                     | Controllo raccomandato, event. sostituzione* | Sostituzione successiva dopo |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Unità elastiche                       |                    |                                                                     |                                                                                |                                                                            |                                              |                              |
| 14                                    | VE3771-08/10       | O-ring per fissare l'unità elastica**                               | usura                                                                          | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 15                                    | SH5803-15/07       | unità elastica, blu, normale, libertà di movimento max. 9°**        | usura<br><br>spostamento delle molle a tazza<br><br>rumori dell'unità elastica | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 15                                    | SH5803-15/15       | unità elastica, verde, media, libertà di movimento max. 9°**        |                                                                                | riallineare le molle a tazza con una pinza                                 |                                              |                              |
| 15                                    | SH5803-10/21       | unità elastica, bianca, forte, libertà di movimento max. 6°**       |                                                                                | lubrificare l'unità elastica con olio lubrificante (codice art. FT3000-15) |                                              |                              |
| 15                                    | SH5803-10/31       | unità elastica, gialla, molto forte, libertà di movimento max. 6°** |                                                                                |                                                                            |                                              |                              |
| 15                                    | SH5803-05/63       | unità elastica, rossa, ultra forte, libertà di movimento max. 3°**  |                                                                                |                                                                            |                                              |                              |
| Ancoraggi modulari e stecche modulari |                    |                                                                     |                                                                                |                                                                            |                                              |                              |
| 16                                    | vedere il catalogo | ancoraggi modulari e stecche modulari                               | usura o rottura                                                                | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | secondo necessità            |

\* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

\*\* parte integrante dell'unità funzionale

\*\*\* componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente