


Commissione del paziente/ID della configurazione \_\_\_\_\_

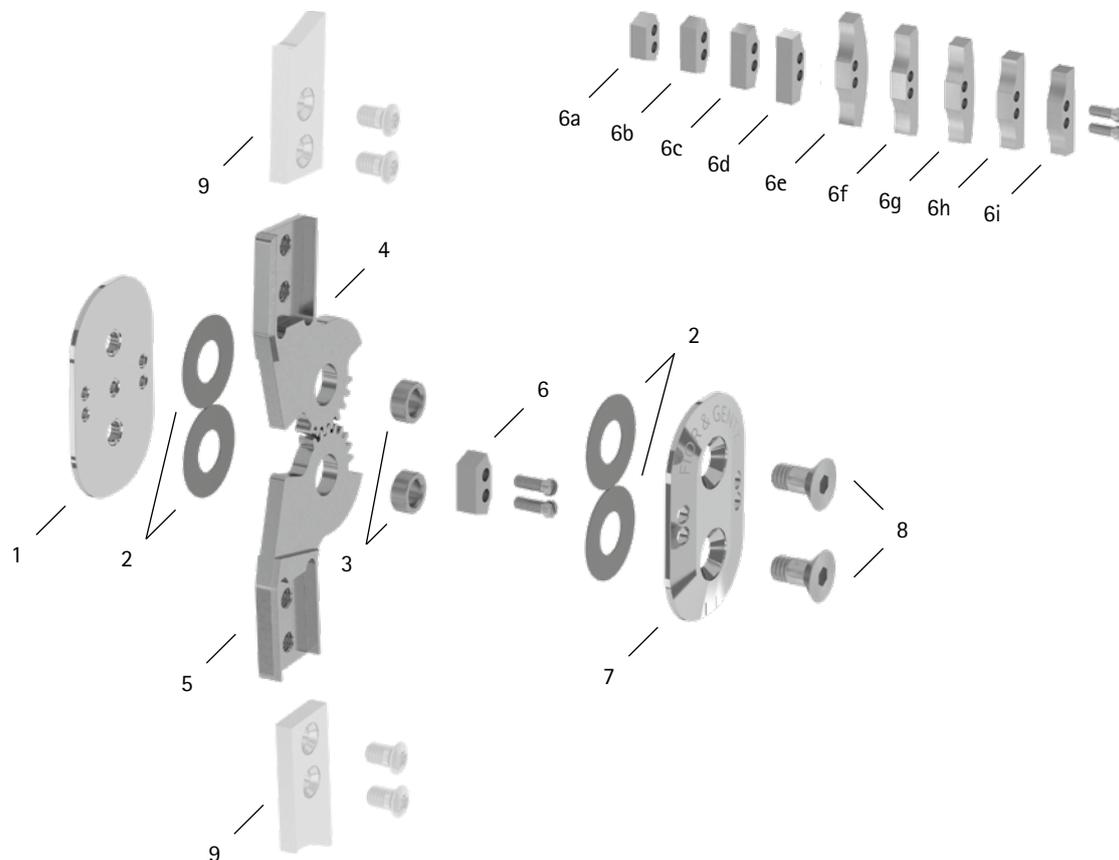

Pos.	16 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
<b>Articolazione modulare</b>						
1	SK0250-ST	piastra di base	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
2	GS2210-050	dischetto di slittamento	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
3	BB9664-92	boccola in bronzo, Ø = 9,6 mm, h = 4,92 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	BB9664-95	boccola in bronzo, Ø = 9,6 mm, h = 4,95 mm				
3	BB9664-98	boccola in bronzo, Ø = 9,6 mm, h = 4,98 mm				
4	SK0203-L/ST	parte superiore, sinistra laterale o destra mediale, diritta, acciaio	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
4	SK0203-R/ST	parte superiore, sinistra mediale o destra laterale, diritta, acciaio				
4	SK0223-L/ST	parte superiore, sinistra laterale o destra mediale, a gomito verso l'interno, acciaio				
4	SK0223-R/ST	parte superiore, sinistra mediale o destra laterale, a gomito verso l'interno, acciaio				
5	SK0213-L/ST	parte inferiore, sinistra laterale o destra mediale, diritta, acciaio				
5	SK0213-R/ST	parte inferiore, sinistra mediale o destra laterale, diritta, acciaio				
5	SK0233-L/ST	parte inferiore, sinistra laterale o destra mediale, a gomito verso l'interno, acciaio	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5	SK0233-R/ST	parte inferiore, sinistra mediale o destra laterale, a gomito verso l'interno, acciaio				

Commissione del paziente/ID della configurazione \_\_\_\_\_



Pos.	16 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
6a	BK9051-E000	arresto di estensione 0°/arresto di flessione 80° con 2 viti a testa piatta a taglio	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
6	BK9051-E005	arresto di estensione 5° con 2 viti a testa piatta a taglio				
6b	BK9051-E010	arresto di estensione 10°/arresto di flessione 70° con 2 viti a testa piatta a taglio				
6c	BK9051-E020	arresto di estensione 20°/arresto di flessione 60° con 2 viti a testa piatta a taglio				
6d	BK9051-E030	arresto di estensione 30°/arresto di flessione 50° con 2 viti a testa piatta a taglio				
6e	BK9051-F000	arresto di flessione 0° con 2 viti a testa piatta a taglio	usura	sostituire	ogni 6 mesi	non necessario
6f	BK9051-F005	arresto di flessione 5° con 2 viti a testa piatta a taglio				
6g	BK9051-F010	arresto di flessione 10° con 2 viti a testa piatta a taglio				
6h	BK9051-F020	arresto di flessione 20° con 2 viti a testa piatta a taglio				
6i	BK9051-F030	arresto di flessione 30° con 2 viti a testa piatta a taglio				
7	SK0251-ST	piastra di copertura	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
8	SC1016-L12	vite a testa svasata a esagono incassato con gambo	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
<b>Ancoraggi modulari e stecche modulari</b>						
9	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

\* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente