


Commissione del paziente/ID della configurazione \_\_\_\_\_

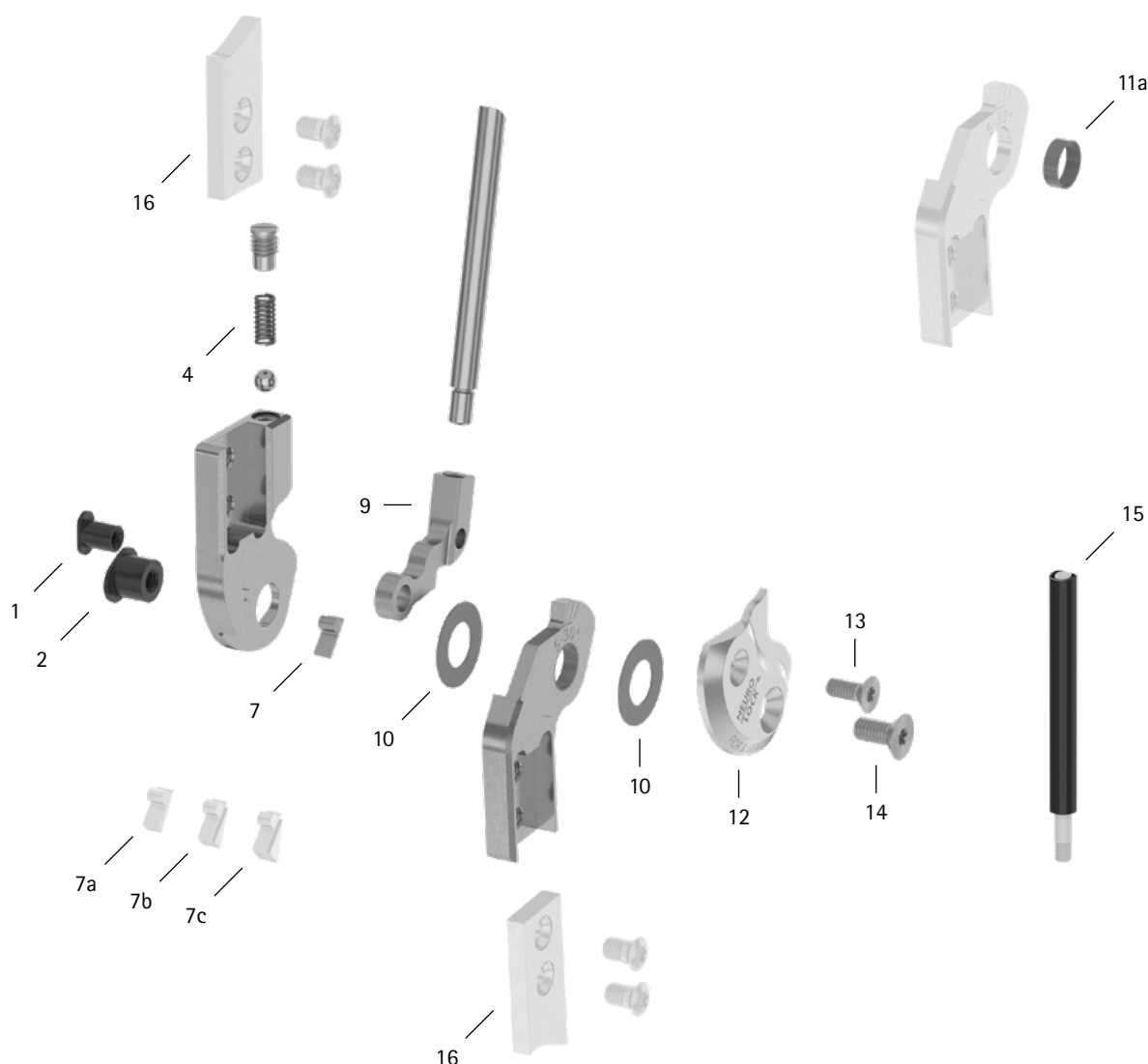

| Pos.                          | 14 mm        | Descrizione                                | Possibile problema | Misura     | Controllo raccomandato, event. sostituzione* | Sostituzione successiva dopo |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Articolazione modulare</b> |              |                                            |                    |            |                                              |                              |
| 1                             | SB6044-L0610 | dado testa ovale (nottolino di arresto)    | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 2                             | SB8554-L0610 | dado testa ovale (asse dell'articolazione) |                    |            |                                              |                              |
| 4                             | FE1414-02    | molla a compressione                       | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 7                             | SK9602-E005  | arresto di estensione 5°                   | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | secondo necessità            |
| 7a                            | SK9602-E010  | arresto di estensione 10°                  |                    |            |                                              |                              |
| 7b                            | SK9602-E020  | arresto di estensione 20°                  |                    |            |                                              |                              |
| 7c                            | SK9602-E030  | arresto di estensione 30°                  |                    |            |                                              |                              |
| 9                             | SK0472-TI050 | nottolino di arresto                       | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 9                             | SK0472-TI063 |                                            |                    |            |                                              |                              |

Commissione del paziente/ID della configurazione \_\_\_\_\_



| Pos.                                                                                                                                                        | 14 mm              | Descrizione                                                         | Possibile problema | Misura     | Controllo raccomandato, event. sostituzione* | Sostituzione successiva dopo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 10                                                                                                                                                          | GS1609-040         | dischetto di slittamento, Ø = 16 mm                                 | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 10                                                                                                                                                          | GS1609-045         |                                                                     |                    |            |                                              |                              |
| 10                                                                                                                                                          | GS1609-050         |                                                                     |                    |            |                                              |                              |
| 10                                                                                                                                                          | GS1609-055         |                                                                     |                    |            |                                              |                              |
| 10                                                                                                                                                          | GS1609-060         |                                                                     |                    |            |                                              |                              |
| 11a                                                                                                                                                         | BP1009-L029        | boccola scorrevole                                                  | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 12                                                                                                                                                          | SK0452-2L/AL       | piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale, alluminio | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 12                                                                                                                                                          | SK0452-2R/AL       | piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale, alluminio |                    |            |                                              |                              |
| 13                                                                                                                                                          | SC1404-L10         | vite a testa svasata con cava esalobata                             | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 14                                                                                                                                                          | SC1405-L10         | vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)            |                    |            |                                              |                              |
| Tiracavo (se presente). Per montare un tiracavo sul nottolino di arresto, è necessario montare un adattatore per tiracavo per ciascun nottolino di arresto. |                    |                                                                     |                    |            |                                              |                              |
| 15                                                                                                                                                          | ZS1000-L400        | tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 400 mm      | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 15                                                                                                                                                          | ZS1000-L500        | tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 500 mm      |                    |            |                                              |                              |
| 15                                                                                                                                                          | ZS1000-L600        | tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 600 mm      |                    |            |                                              |                              |
| 15                                                                                                                                                          | ZS1000-L700        | tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 700 mm      |                    |            |                                              |                              |
| 15                                                                                                                                                          | ZS1100-L400        | tiracavo, separabile mediante elemento di accoppiamento, 400 mm     |                    |            |                                              |                              |
| 15                                                                                                                                                          | ZS1100-L500        | tiracavo, separabile mediante elemento di accoppiamento, 500 mm     |                    |            |                                              |                              |
| Ancoraggi modulari e stecche modulari                                                                                                                       |                    |                                                                     |                    |            |                                              |                              |
| 16                                                                                                                                                          | vedere il catalogo | ancoraggi modulari e stecche modulari                               | usura o rottura    | sostituire | ogni 6 mesi                                  | secondo necessità            |

\* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente