


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

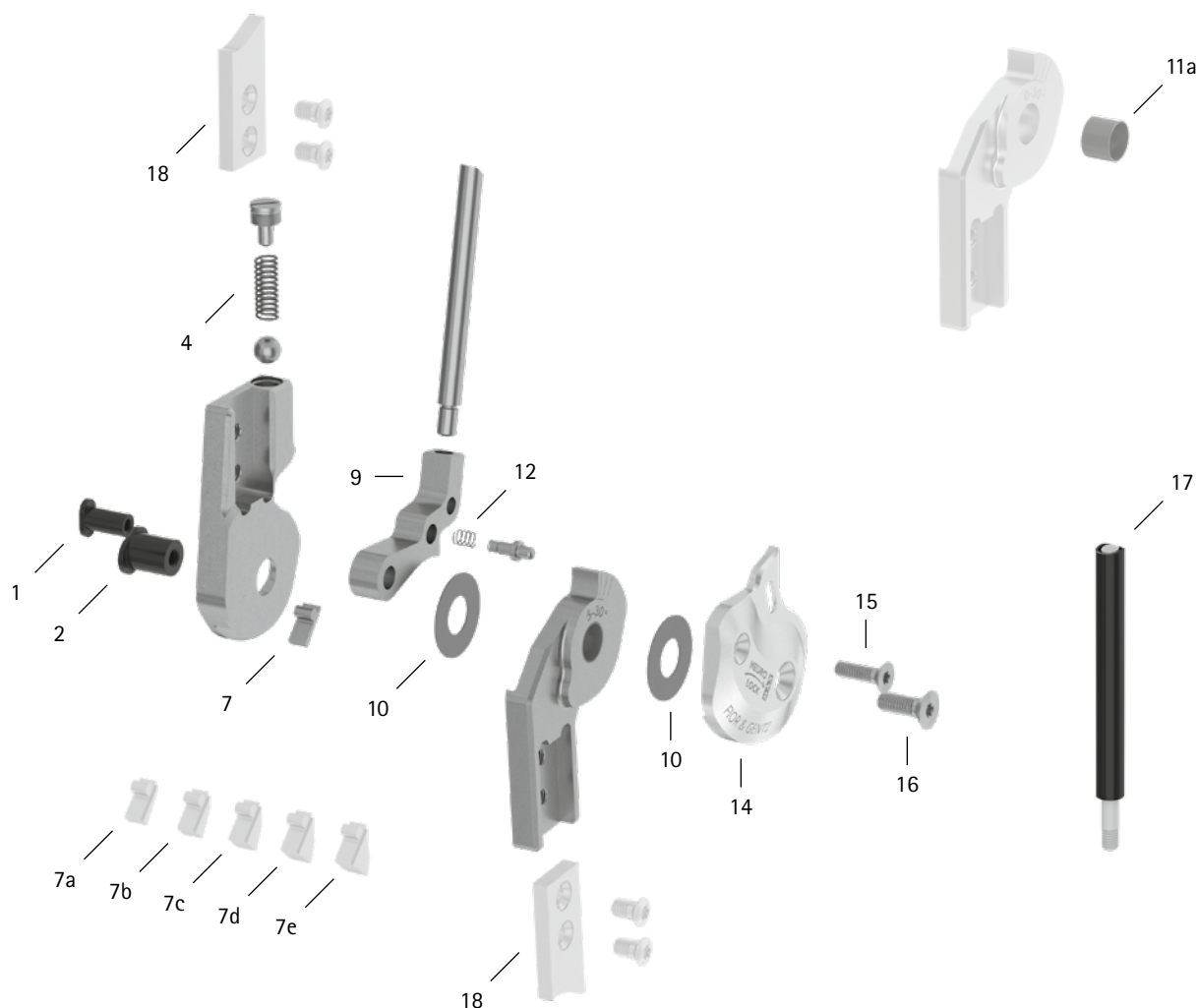

Pos.	14 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB6049-L0950	dado testa ovale (nottolino di arresto)	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
2	SB8559-L0950	dado testa ovale (asse dell'articolazione)				
4	FE1414-01	molla a compressione	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7	SK9802-E005	arresto di estensione 5°	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
7a	SK9802-E010	arresto di estensione 10°				
7b	SK9802-E015	arresto di estensione 15°				
7c	SK9802-E020	arresto di estensione 20°				
7d	SK9802-E025	arresto di estensione 25°				
7e	SK9802-E030	arresto di estensione 30°				
9	SK0772-L/038	nottolino di arresto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
9	SK0772-L/050					
9	SK0772-L/063					
9	SK0772-L/075					
9	SK0772-L/088					
9	SK0772-L/100					

Commissione del paziente/ID della configurazione _____



Pos.	14 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
10	GS2009-040	dischetto di slittamento, Ø = 20 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
10	GS2009-045					
10	GS2009-050					
10	GS2009-055					
10	GS2009-060					
11a	BP1009-L065	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
12	FE1411-02	molla a compressione	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
14	SK0862-2L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale, alluminio	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
14	SK0862-2R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale, alluminio				
15	SC1404-L12	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
16	SC1405-L12	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)				
Tiracavo (se presente). Per montare un tiracavo sul nottolino di arresto, è necessario montare un adattatore per tiracavo per ciascun nottolino di arresto.						
17	ZS1000-L400	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 400 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
17	ZS1000-L500	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 500 mm				
17	ZS1000-L600	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 600 mm				
17	ZS1000-L700	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 700 mm				
17	ZS1100-L400	tiracavo, separabile mediante elemento di accoppiamento, 400 mm				
17	ZS1100-L500	tiracavo, separabile mediante elemento di accoppiamento, 500 mm				
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
18	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** Se anziché i nottolini di arresto qui rappresentati per sinistra laterale o destra mediale è necessario un nottolino di arresto per destra laterale o sinistra mediale, sostituire la L nel codice articolo con la lettera R. Ad esempio: SK0775-R/025.