


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

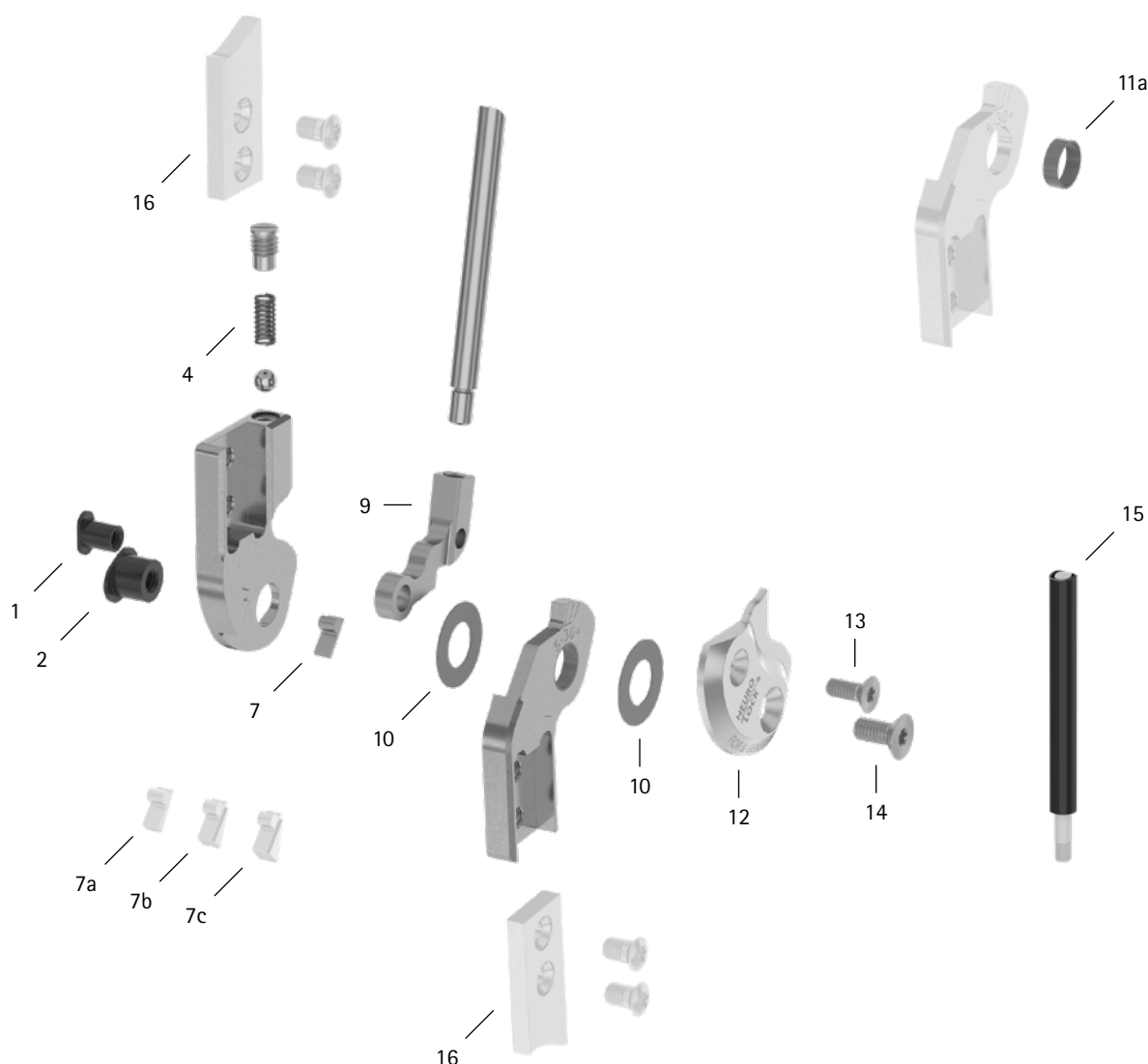

Pos.	16 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB6044-L0750	dado testa ovale (nottolino di arresto)	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
2	SB9664-L0750	dado testa ovale (asse dell'articolazione)				
4	FE1414-02	molla a compressione	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7	SK9603-E005	arresto di estensione 5°	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
7a	SK9603-E010	arresto di estensione 10°				
7b	SK9603-E020	arresto di estensione 20°				
7c	SK9603-E030	arresto di estensione 30°				
9	SK0473-TI038	nottolino di arresto	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
9	SK0473-TI050					
9	SK0473-TI063					
9	SK0473-TI075					
9	SK0473-TI088					
9	SK0473-TI100					

Commissione del paziente/ID della configurazione _____



Pos.	16 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
10	GS1910-040	dischetto di slittamento, Ø = 19 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
10	GS1910-045					
10	GS1910-050					
10	GS1910-055					
10	GS1910-060					
11a	BP1110-L035	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
12	SK0453-2L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale, alluminio	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
12	SK0453-2R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale, alluminio				
13	SC1404-L10	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
14	SC1405-L11	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)				
Tiracavo (se presente). Per montare un tiracavo sul nottolino di arresto, è necessario montare un adattatore per tiracavo per ciascun nottolino di arresto.						
15	ZS1000-L400	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 400 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
15	ZS1000-L500	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 500 mm				
15	ZS1000-L600	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 600 mm				
15	ZS1000-L700	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 700 mm				
15	ZS1100-L400	tiracavo, separabile mediante elemento di accoppiamento, 400 mm				
15	ZS1100-L500	tiracavo, separabile mediante elemento di accoppiamento, 500 mm				
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
16	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente