


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

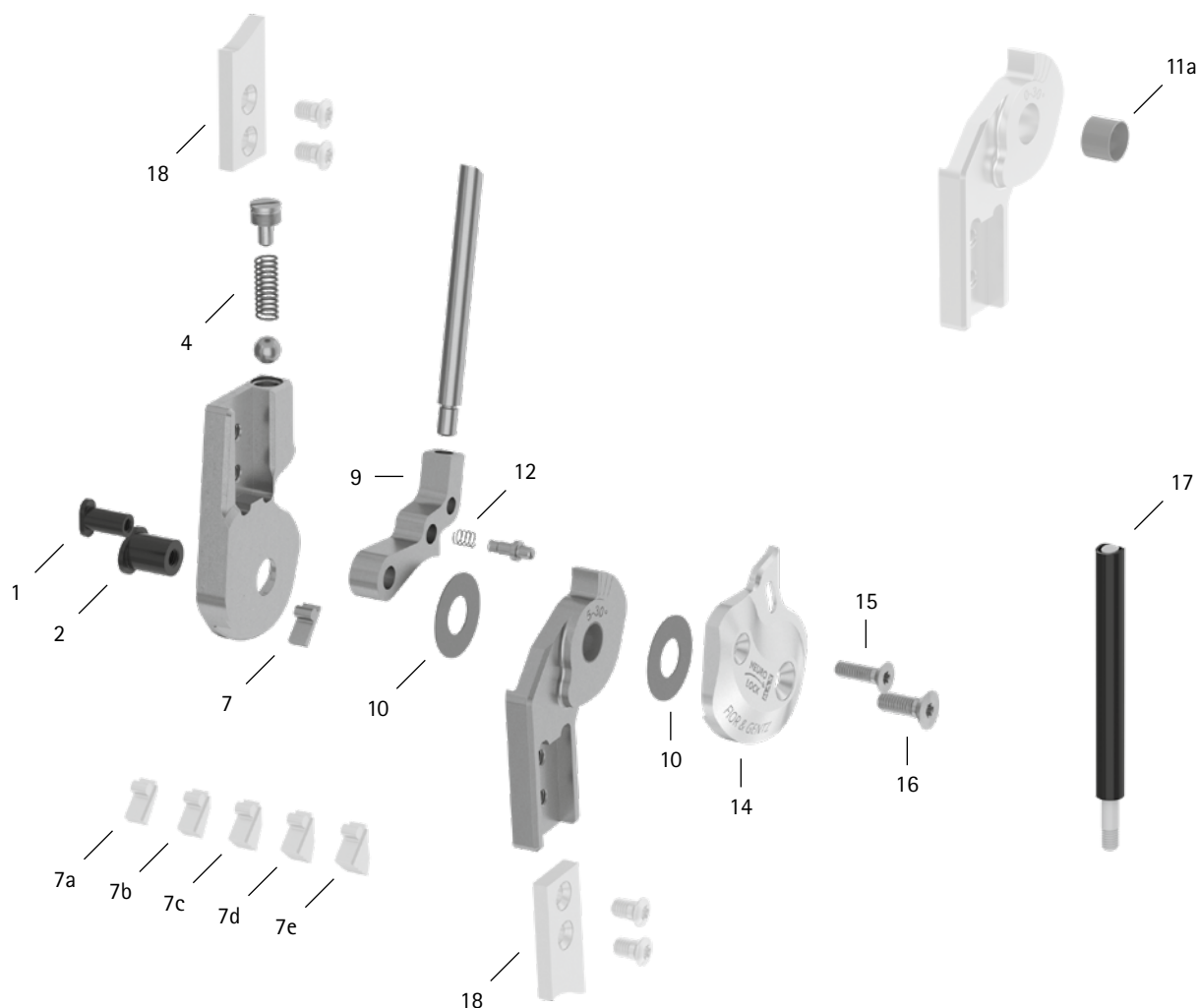

Pos.	20 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB8559-L1290	dado testa ovale (nottolino di arresto)	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
2	SB1069-L1290	dado testa ovale (asse dell'articolazione)				
4	FE2726-01	molla a compressione	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7	SK9805-E005	arresto di estensione 5°	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
7a	SK9805-E010	arresto di estensione 10°				
7b	SK9805-E015	arresto di estensione 15°				
7c	SK9805-E020	arresto di estensione 20°				
7d	SK9805-E025	arresto di estensione 25°				
7e	SK9805-E030	arresto di estensione 30°				
9	SK0775-L/025	nottolino di arresto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
9	SK0775-L/038					
9	SK0775-L/050					
9	SK0775-L/063					
9	SK0775-L/075					
9	SK0775-L/088					

Commissione del paziente/ID della configurazione _____



Pos.	20 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
10	GS2411-040	dischetto di slittamento, Ø = 24 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
10	GS2411-045					
10	GS2411-050					
10	GS2411-055					
10	GS2411-060					
11a	BP1211-L090	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
12	FE1411-02	molla a compressione	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
14	SK0865-2L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale, alluminio	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
14	SK0865-2R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale, alluminio				
15	SC1405-L14	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
16	SC1406-L14	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)				
Tiracavo (se presente). Per montare un tiracavo sul nottolino di arresto, è necessario montare un adattatore per tiracavo per ciascun nottolino di arresto.						
17	ZS1000-L400	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 400 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
17	ZS1000-L500	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 500 mm				
17	ZS1000-L600	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 600 mm				
17	ZS1000-L700	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 700 mm				
17	ZS1100-L400	tiracavo, separabile mediante elemento di accoppiamento, 400 mm				
17	ZS1100-L500	tiracavo, separabile mediante elemento di accoppiamento, 500 mm				
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
18	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** Se anziché i nottolini di arresto qui rappresentati per sinistra laterale o destra mediale è necessario un nottolino di arresto per destra laterale o sinistra mediale, sostituire la L nel codice articolo con la lettera R. Ad esempio: SK0775-R/025.