


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

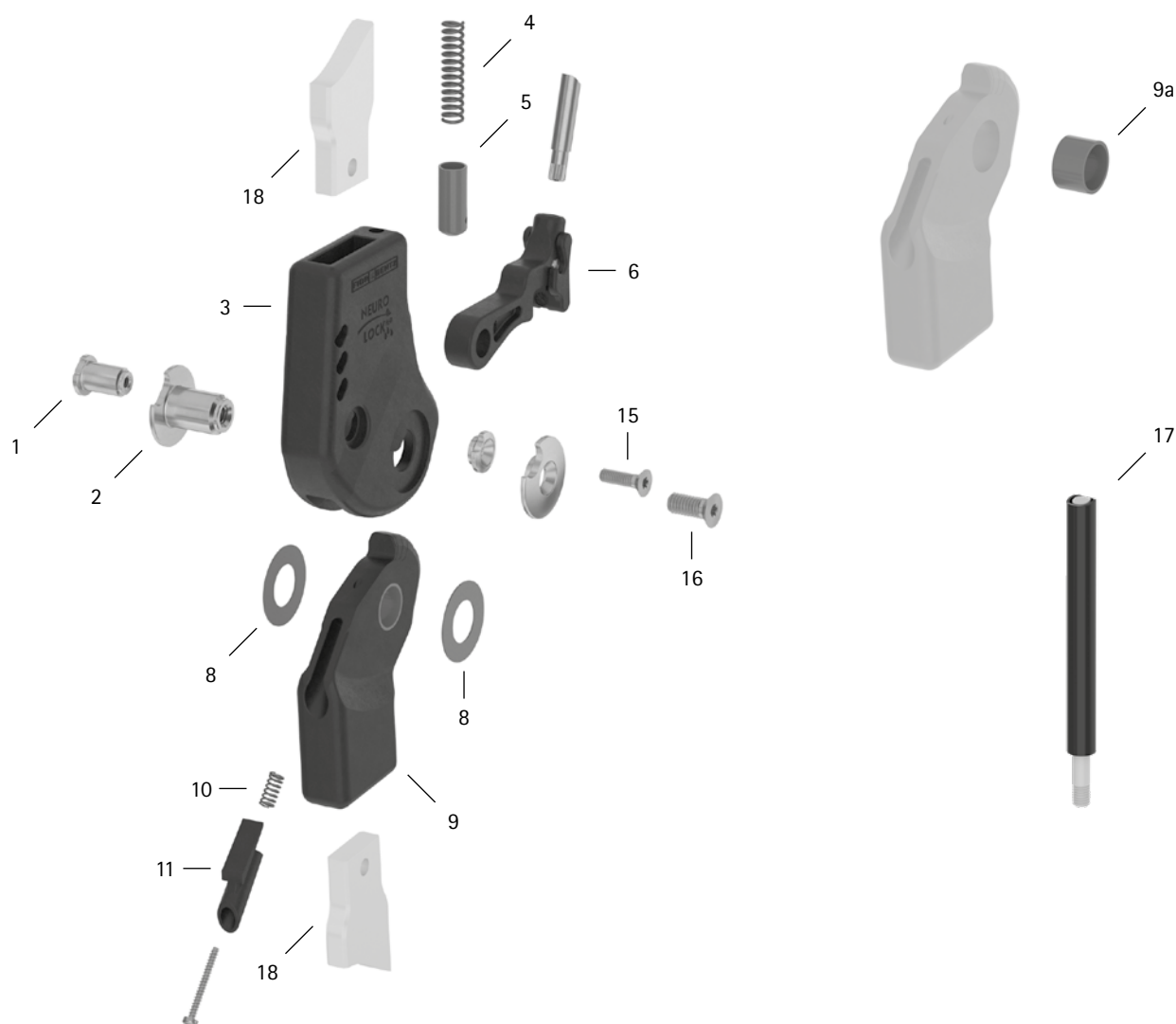

Pos.	20 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SK0895-3/C	dado testa ovale (nottolino di arresto)	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
2	SK0895-1/C	dado testa ovale (asse dell'articolazione)	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
3	SK0805-C	parte superiore, diritta, carbonio	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
4	FE1733-02	molla a compressione	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5	SK0875-10/C	guida della molla	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
6	SK0875-5/C	nottolino di arresto con nottolino di fissaggio, ibrido carbonio-titanio	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
8	GS2413-040	dischetto di slittamento, Ø = 24 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
8	GS2413-045					
8	GS2413-050					
8	GS2413-055					
8	GS2413-060					
9	SK0815-2/C	parte inferiore 5° con boccia scorrevole, diritta, ibrido carbonio-titanio	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
9a	BP1412-L090	boccia scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
10	FE1510-02	molla a compressione	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
11	SK9805-E005/C	arresto di estensione 5°	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
15	SC1404-L14	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
16	SC1406-L14	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)				

Commissione del paziente/ID della configurazione _____



Pos.	20 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Tiracavo (se presente). Per montare un tiracavo sul nottolino di arresto, è necessario montare un adattatore per tiracavo per ciascun nottolino di arresto.						
17	ZS1000-L400	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 400 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
17	ZS1000-L500	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 500 mm				
17	ZS1000-L600	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 600 mm				
17	ZS1000-L700	tiracavo, cavo in nylon con guaina per cavo flessibile, 700 mm				
17	ZS1100-L400	tiracavo, separabile mediante elemento di accoppiamento, 400 mm				
17	ZS1100-L500	tiracavo, separabile mediante elemento di accoppiamento, 500 mm				
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
18	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente