
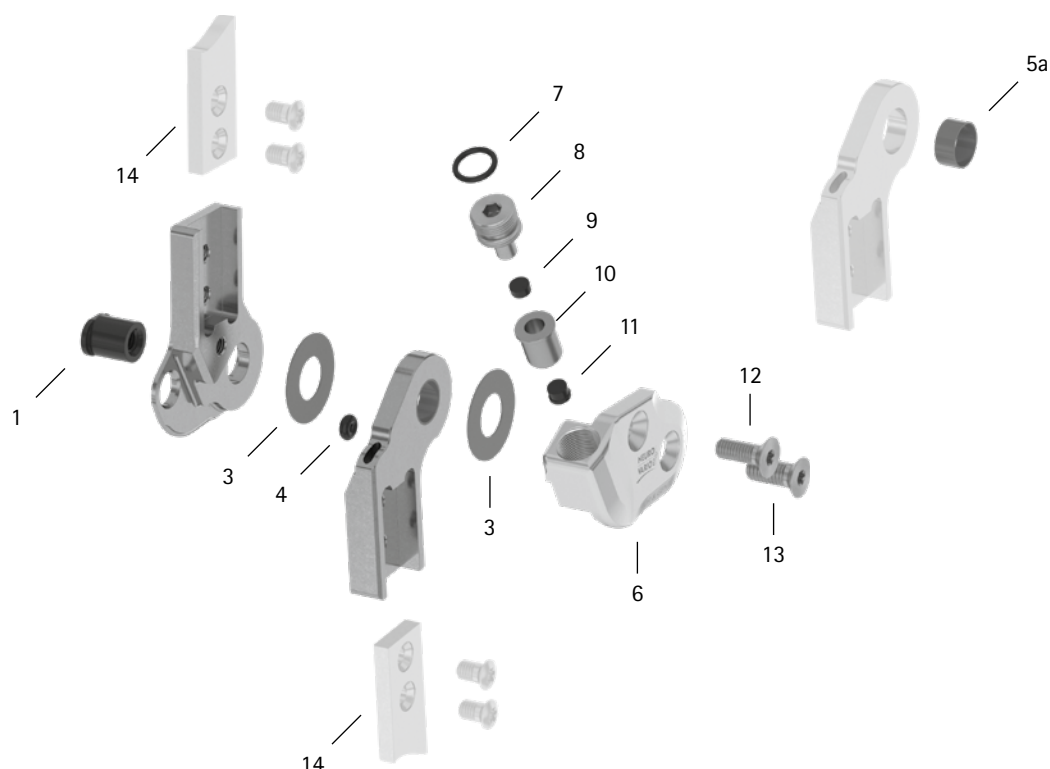


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

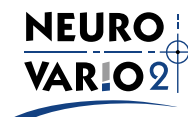

Pos.	12 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB8559-L0930	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	GS1609-040	dischetto di slittamento, Ø = 16 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
3	GS1609-045					
3	GS1609-050					
3	GS1609-055					
3	GS1609-060					
4	VE3771-010/20	O-ring ammortizzatore	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5a	BP1009-L050	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6	SL0261-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale, alluminio**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6	SL0261-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale, alluminio**				
7	VE3771-04/10	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	PN0003-L02	ammortizzatore dell'arresto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
11	SL0281-04	arresto di estensione**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
12	SC1404-L12	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
13	SC1405-L12	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
6-13	SL2931-L	unità funzionale modularità plug + go, sinistra laterale o destra mediale***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6-13	SL2931-R	unità funzionale modularità plug + go, sinistra mediale o destra laterale***				
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
14	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente

WP0115-IT-2024-04