


Commissione del paziente/ID della configurazione \_\_\_\_\_

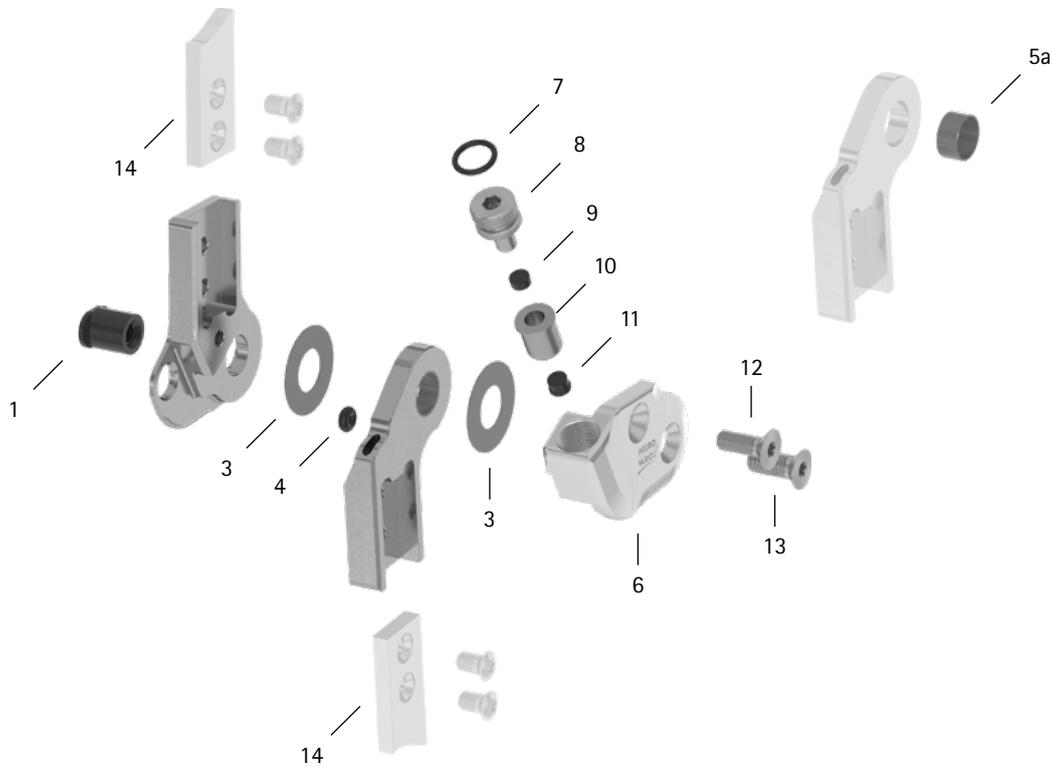

Pos.	14 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
<b>Articolazione modulare</b>						
1	SB9669-L0950	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	GS1910-040	dischetto di slittamento, Ø = 19 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
3	GS1910-045					
3	GS1910-050					
3	GS1910-055					
3	GS1910-060					
4	VE3771-010/20	O-ring ammortizzatore	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5a	BP1110-L050	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6	SL0262-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale, alluminio**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6	SL0262-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale, alluminio**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
7	VE3771-050/10	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	PN0004-L02	ammortizzatore dell'arresto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
11	SL0282-04	arresto di estensione**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
12	SC1405-L12	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
13	SC1405-L12	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
6-13	SL2932-L	unità funzionale modularità plug + go, sinistra laterale o destra mediale***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6-13	SL2932-R	unità funzionale modularità plug + go, sinistra mediale o destra laterale***				
<b>Ancoraggi modulari e stecche modulari</b>						
14	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

\* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

\*\* parte integrante dell'unità funzionale

\*\*\* componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente