


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

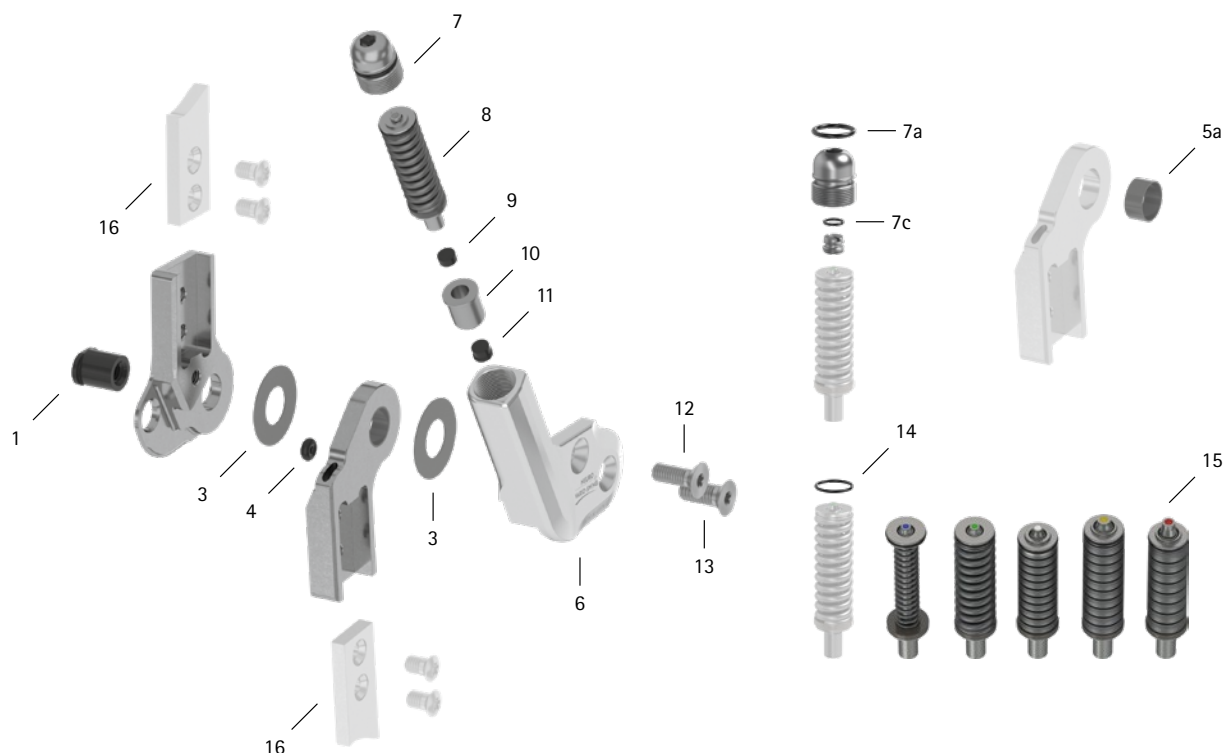

Pos.	14 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB9669-L0950	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	GS1910-040	dischetto di slittamento, Ø = 19 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
3	GS1910-045					
3	GS1910-050					
3	GS1910-055					
3	GS1910-060					
4	VE3771-010/20	O-ring ammortizzatore	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5a	BP1110-L050	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6	SL0252-L/AL	piastra di copertura, sinistra lat. o destra med., alluminio**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6	SL0252-R/AL	piastra di copertura, sinistra med. o destra lat., alluminio**				
7a	VE3771-08/15	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7c	VE3771-04/10	O-ring per fissare la vite di limitazione del movimento**			ogni 6 mesi	18 mesi
9	PN0004-L02	ammortizzatore dell'arresto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
11	SL0282-04	arresto di estensione**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
12	SC1405-L12	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
13	SC1405-L12	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
6-13	SL2952-L	unità funzionale modularità plug + go, sinistra laterale o destra mediale***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6-13	SL2952-R	unità funzionale modularità plug + go, sinistra mediale o destra laterale***				

Commissione del paziente/ID della configurazione _____



Pos.	14 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Unità elastiche						
14	VE3771-06/10	O-ring per fissare l'unità elastica**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
15	SH5801-15/03	unità elastica, blu, normale, libertà di movimento max. 9°**	usura spostamento delle molle a tazza rumori dell'unità elastica	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
15	SH5801-15/06	unità elastica, verde, media, libertà di movimento max. 9°**		riallineare le molle a tazza con una pinza		
15	SH5801-10/12	unità elastica, bianca, forte, libertà di movimento max. 6°**		lubrificare l'unità elastica con olio lubrificante (codice art. FT3000-15)		
15	SH5801-10/19	unità elastica, gialla, molto forte, libertà di movimento max. 6°**				
15	SH5801-05/33	unità elastica, rossa, ultra forte, libertà di movimento max. 3°**				
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
16	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente