


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

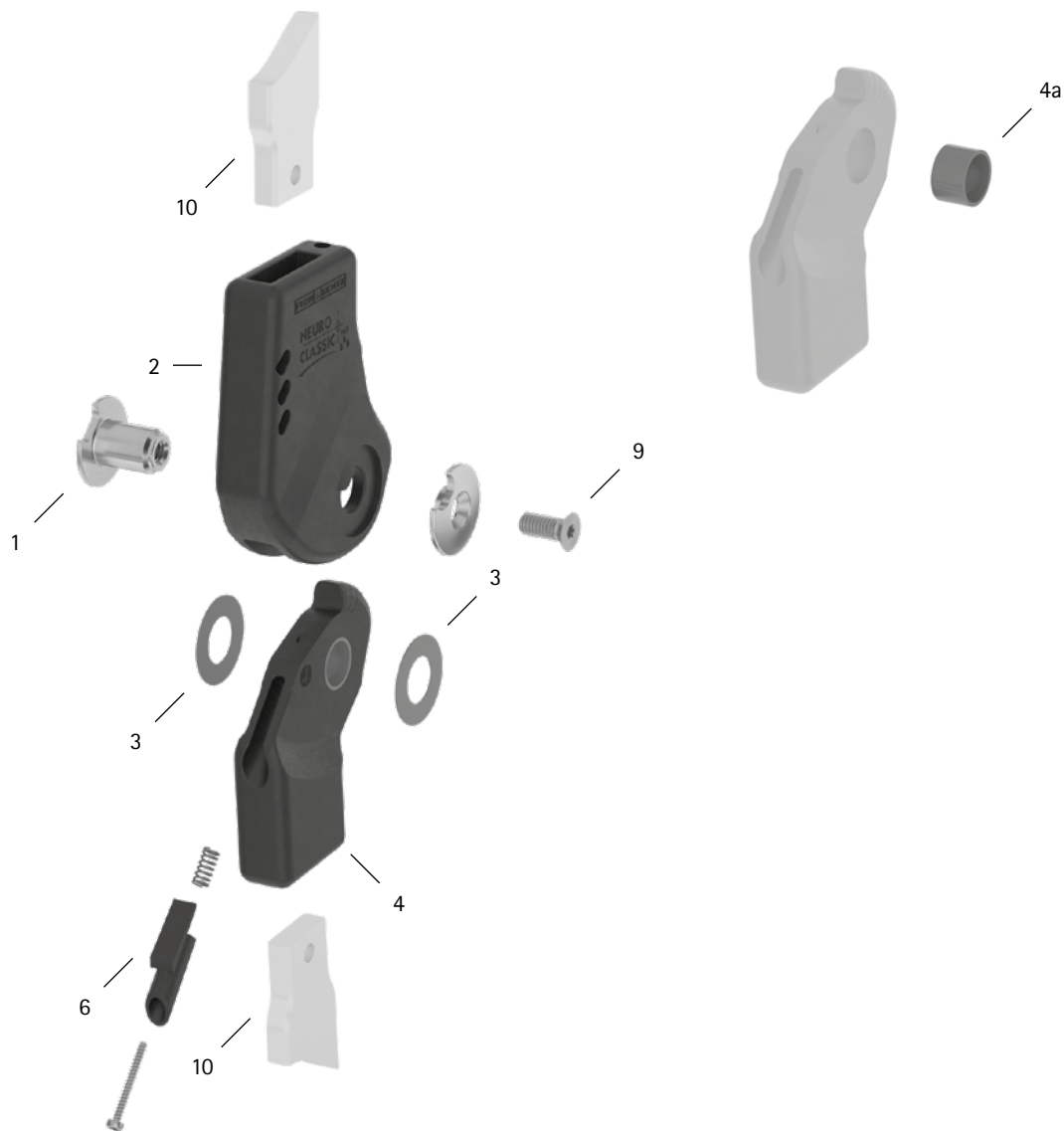

Pos.	14 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SK0892-1/C	dado testa ovale	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
2	SL0102-C	parte superiore, diritta, carbonio	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
3	GS2009-040	dischetto di slittamento, Ø = 20 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
3	GS2009-045					
3	GS2009-050					
3	GS2009-055					
3	GS2009-060					
4	SK0812-2/C	parte inferiore 5° con boccia scorrevole, diritta, ibrido carbonio-titanio	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
4a	BP1009-L059	boccia scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6	SK9802-E005/C	arresto di estensione 5°	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
9	SC1404-L10	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
10	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente