


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

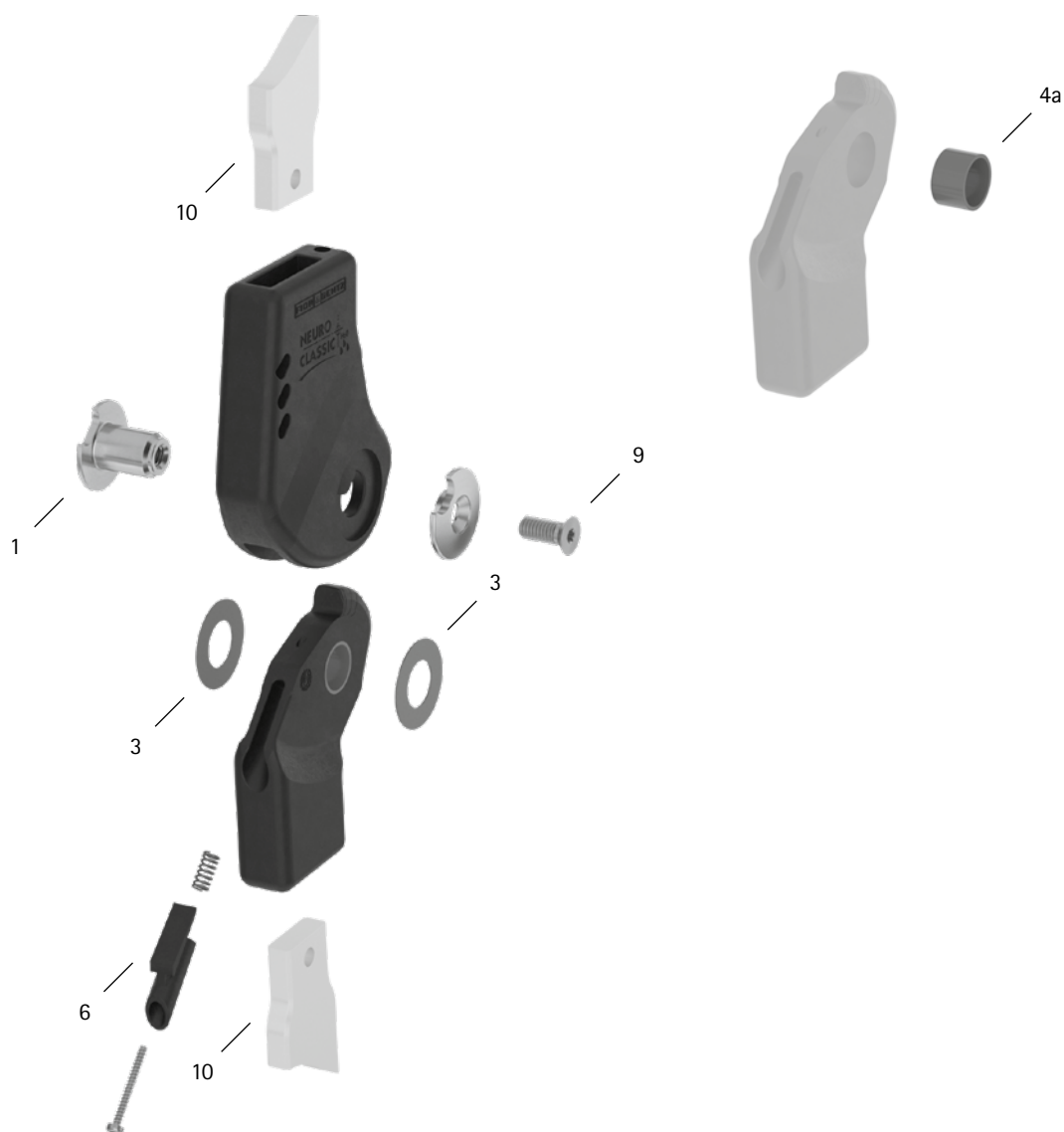

Pos.	16 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SK0893-1/C	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	GS2311-040	dischetto di slittamento, $\varnothing = 23$ mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
3	GS2311-045					
3	GS2311-050					
3	GS2311-055					
3	GS2311-060					
4a	BP1211-L077	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6	SK9803-E005/C	arresto di estensione 5°	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
9	SC1405-L14	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
10	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

WP0122-IT-2023-01