


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

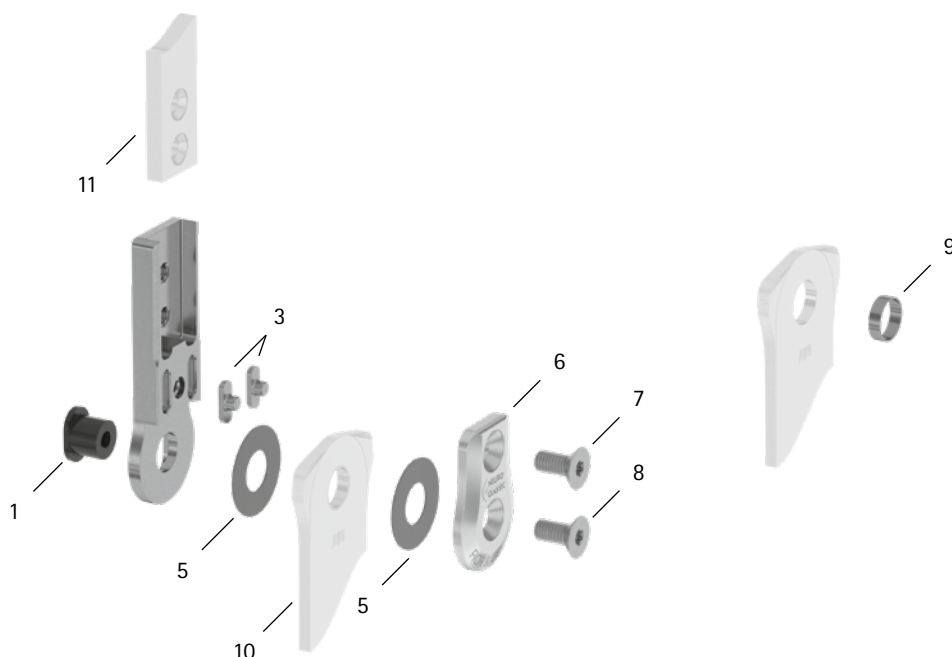

Pos.	14 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB8559-L0580	dado testa ovale, corto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	SF0392-02	linguetta di aggiustamento con perno	rottura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5	GS2009-040	dischetto di slittamento, Ø = 20 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5	GS2009-045					
5	GS2009-050					
5	GS2009-055					
5	GS2009-060					
6	SF0162-AL	piastra di copertura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
7	SC1405-L10	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
8	SC1405-L10	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
1, 6-8	SF1972-AL	unità funzionale modularità plug + go***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
9	BR1009-L025	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
10	vedere il catalogo	staffe per piede modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
11	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente