
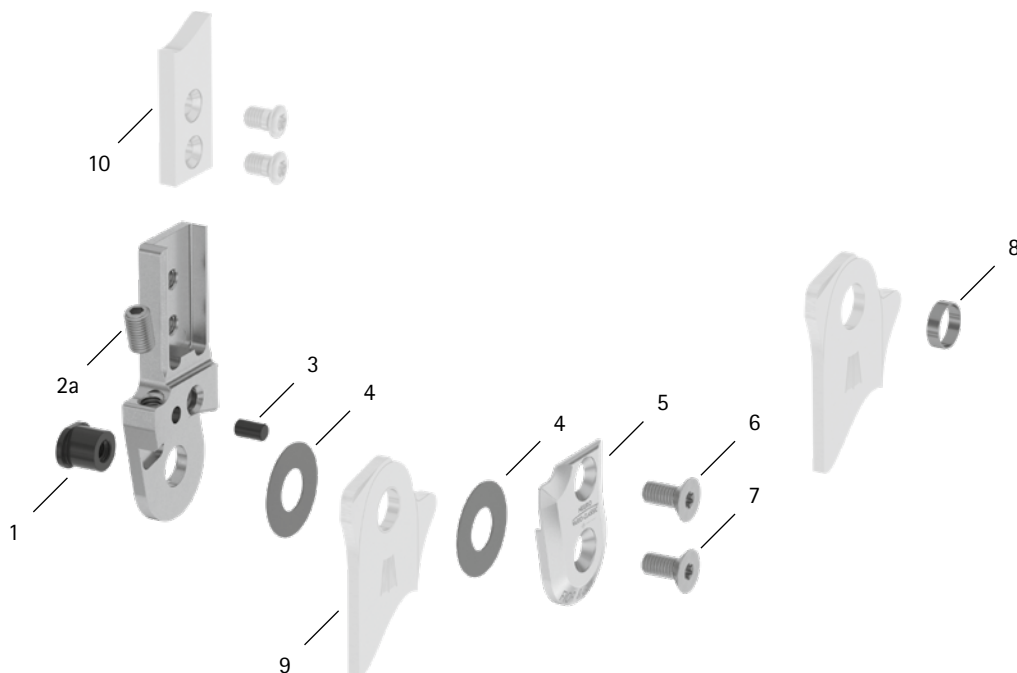


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

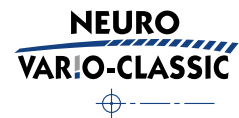

Pos.	16 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB9669-L0760	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
2a	SC9606-L10ST	vite di regolazione	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
3	GS4007	perno filettato	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
4	GS2210-040	dischetto di slittamento, Ø = 22 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
4	GS2210-045					
4	GS2210-050					
4	GS2210-055					
4	GS2210-060					
5	SH0263-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5	SH0263-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale				
6	SC1405-L11	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
7	SC1405-L11	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)				
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
8	BR1110-L030	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	vedere il catalogo	staffe per piede modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
10	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

WP0010-IT-2023-01