


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

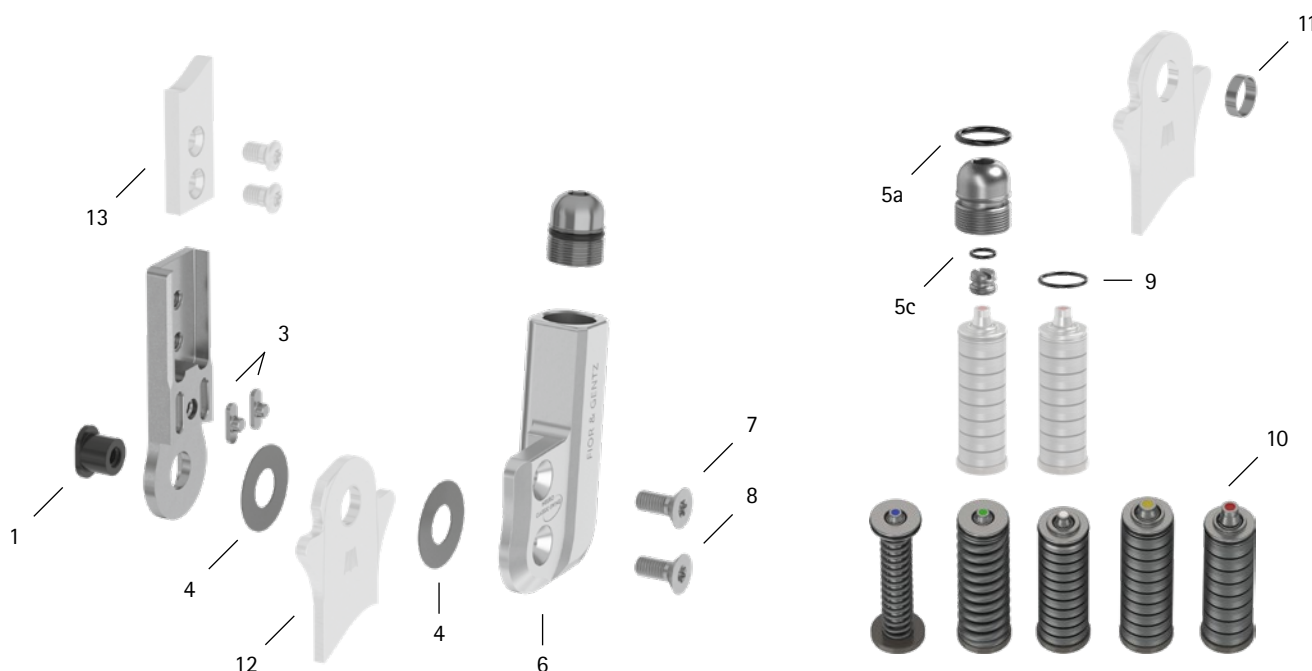

Pos.	10 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo		
Articolazione modulare								
1	SB6039-L0580	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi		
3	SF0390-01	linguetta di aggiustamento con perno	rottura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi		
4	GS1206-040	dischetto di slittamento, Ø = 12 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi		
4	GS1206-045							
4	GS1206-050							
4	GS1206-055							
4	GS1206-060							
5a	VE3771-06/11	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi		
5c	VE3771-03/10	O-ring per fissare la vite di limitazione del movimento**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi		
6	SH0360-2L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi		
6	SH0360-2R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale**						
7	SC1403-L08	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi		
8	SC1403-L08	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**						
5-8	SH3970-L/AL	unità funzionale, sinistra laterale o destra mediale***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi		
5-8	SH3970-R/AL	unità funzionale, sinistra mediale o destra laterale***						
Unità elastiche								
9	VE3771-045/10	O-ring per fissare l'unità elastica	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi		
10	SF5800-15/02	unità elastica, blu, normale, mobilità max. 15°	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi		
10	SF5800-15/04	unità elastica, verde, media, mobilità max. 15°						
10	SF5800-10/06	unità elastica, bianca, forte, mobilità max. 10°	spostamento delle molle a tazza	riallineare le molle a tazza con una pinza				
10	SF5800-10/09	unità elastica, gialla, molto forte, mobilità max. 10°					rumori dell'unità elastica	lubrificare l'unità elastica con olio lubrificante (codice art. FT3000-15)
10	SF5800-05/17	unità elastica, rossa, ultra forte, mobilità max. 5°						
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare								
11	BP0706-L020	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi		
12	vedere il catalogo	staffe per piede modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi		
13	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità		

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente