


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

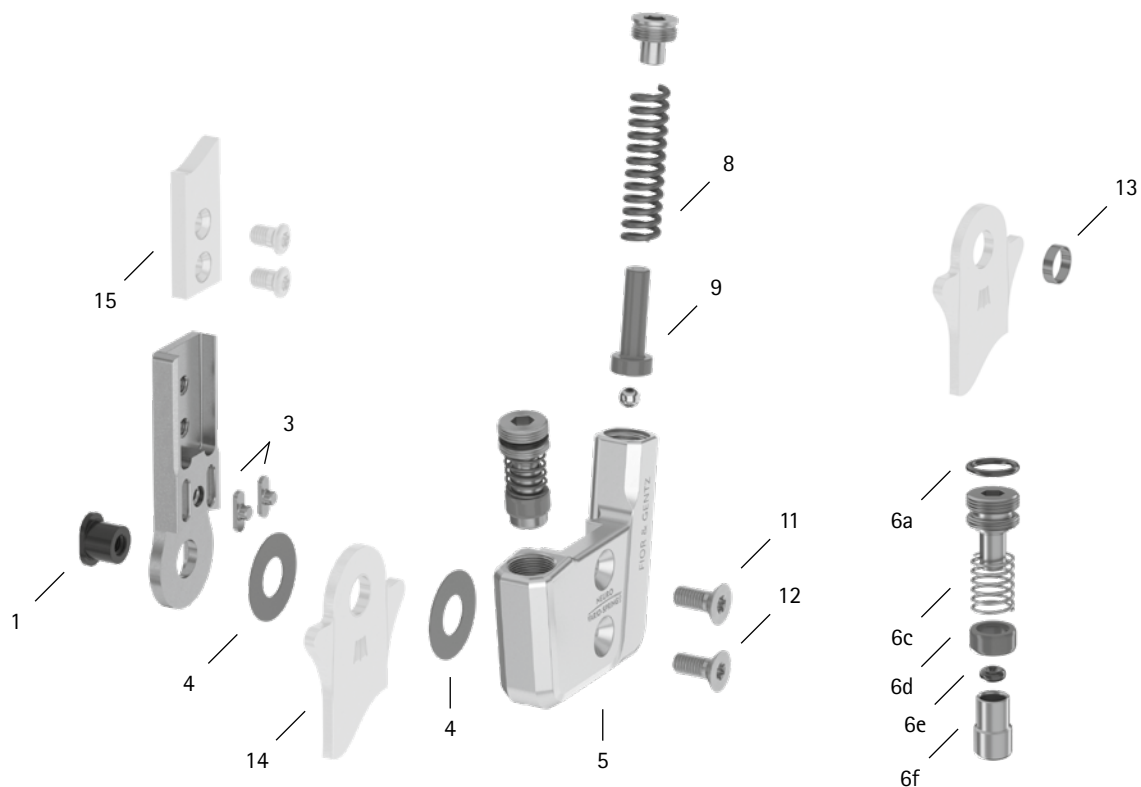

Pos.	10 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB6039-L0580	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	SF0390-01	linguetta di aggiustamento con perno	rottura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
4	GS1206-040	dischetto di slittamento, Ø = 12 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
4	GS1206-045					
4	GS1206-050					
4	GS1206-055					
4	GS1206-060					
5	SF0860-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5	SF0860-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale**				
6a	VE3771-04/10	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6c	FE1615-01	molla a compressione**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6d	GS0604-350	boccola scorrevole**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6e	PN0003-L02	ammortizzatore dell'arresto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6f	SH0490-01	pistone**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
8	FE1622-01	molla a compressione, dorata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	SF0840-07	bullone**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
11	SC1403-L08	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
12	SC1403-L08	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
5-12	SF8970-L/AL	unità funzionale modularità plug + go, sinistra laterale o destra mediale***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5-12	SF8970-R/AL	unità funzionale modularità plug + go, sinistra mediale o destra laterale***				
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
13	BP0706-L020	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
14	vedere il catalogo	staffe per piede modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
15	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente