


Commissione del paziente/ID della configurazione \_\_\_\_\_

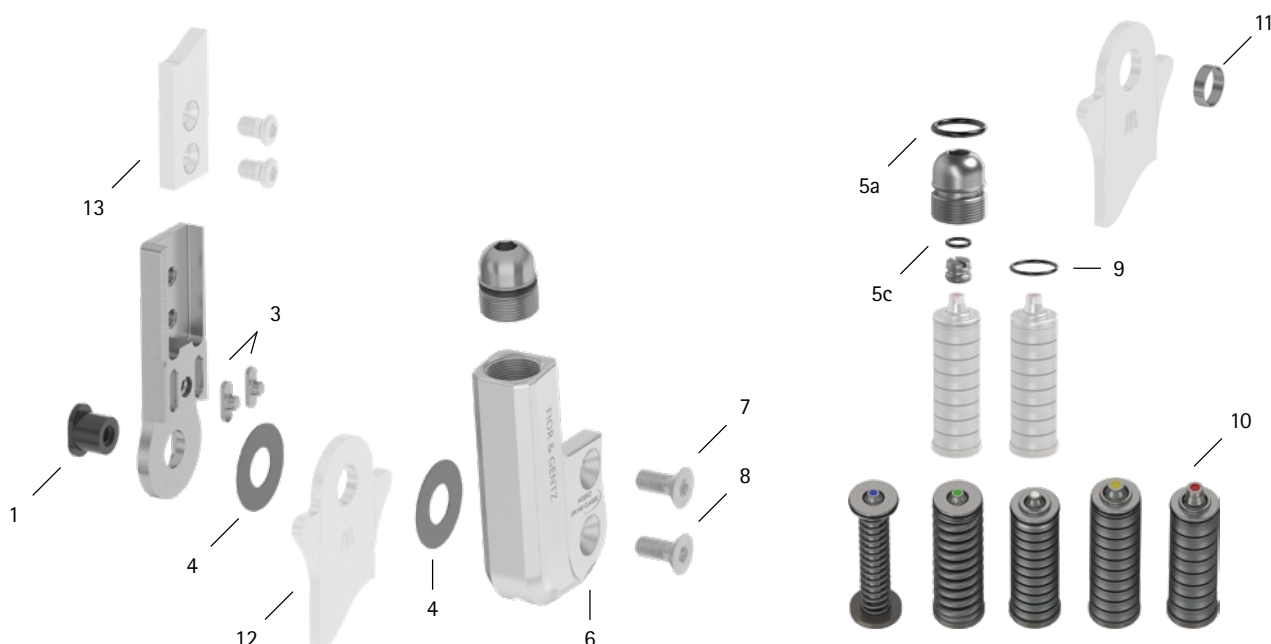

| Pos.                                                             | 10 mm              | Descrizione                                                                  | Possibile problema         | Misura                                                                     | Controllo raccomandato, event. sostituzione* | Sostituzione successiva dopo |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Articolazione modulare                                           |                    |                                                                              |                            |                                                                            |                                              |                              |
| 1                                                                | SB6039-L0580       | dado testa ovale                                                             | usura                      | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 3                                                                | SF0390-01          | linguetta di aggiustamento con perno                                         | rottura                    | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 4                                                                | GS1206-040         | dischetto di slittamento, Ø = 12 mm                                          | usura                      | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 4                                                                | GS1206-045         |                                                                              |                            |                                                                            |                                              |                              |
| 4                                                                | GS1206-050         |                                                                              |                            |                                                                            |                                              |                              |
| 4                                                                | GS1206-055         |                                                                              |                            |                                                                            |                                              |                              |
| 4                                                                | GS1206-060         |                                                                              |                            |                                                                            |                                              |                              |
| 5a                                                               | VE3771-06/11       | O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**                  | usura                      | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 5c                                                               | VE3771-03/10       | O-ring per fissare la vite di limitazione del movimento**                    | usura                      | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 6                                                                | SH0160-2L/AL       | piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale**                   | usura                      | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 6                                                                | SH0160-2R/AL       | piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale**                   |                            |                                                                            |                                              |                              |
| 7                                                                | SC1403-L08         | vite a testa svasata con cava esalobata**                                    | usura                      | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 8                                                                | SC1403-L08         | vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**                   |                            |                                                                            |                                              |                              |
| 5-8                                                              | SH1970-L/AL        | unità funzionale modularità plug + go, sinistra laterale o destra mediale*** | perdita di funzione, usura | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 5-8                                                              | SH1970-R/AL        | unità funzionale modularità plug + go, sinistra mediale o destra laterale*** |                            |                                                                            |                                              |                              |
| Unità elastiche                                                  |                    |                                                                              |                            |                                                                            |                                              |                              |
| 9                                                                | VE3771-045/10      | O-ring per fissare l'unità elastica                                          | usura                      | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 10                                                               | SF5800-15/02       | unità elastica, blu, normale, mobilità max. 15°                              | usura                      | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 10                                                               | SF5800-15/04       | unità elastica, verde, media, mobilità max. 15°                              |                            |                                                                            |                                              |                              |
| 10                                                               | SF5800-10/06       | unità elastica, bianca, forte, mobilità max. 10°                             |                            |                                                                            |                                              |                              |
| 10                                                               | SF5800-10/09       | unità elastica, gialla, molto forte, mobilità max. 10°                       | rumori dell'unità elastica | lubrificare l'unità elastica con olio lubrificante (codice art. FT3000-15) | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 10                                                               | SF5800-05/17       | unità elastica, rossa, ultra forte, mobilità max. 5°                         |                            |                                                                            |                                              |                              |
| Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare |                    |                                                                              |                            |                                                                            |                                              |                              |
| 11                                                               | BP0706-L020        | boccola scorrevole                                                           | usura                      | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 12                                                               | vedere il catalogo | staffe per piede modulari                                                    | usura o rottura            | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 48 mesi                      |
| 13                                                               | vedere il catalogo | ancoraggi modulari e stecche modulari                                        | usura o rottura            | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | secondo necessità            |

\* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

\*\* parte integrante dell'unità funzionale

\*\*\* componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente