


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

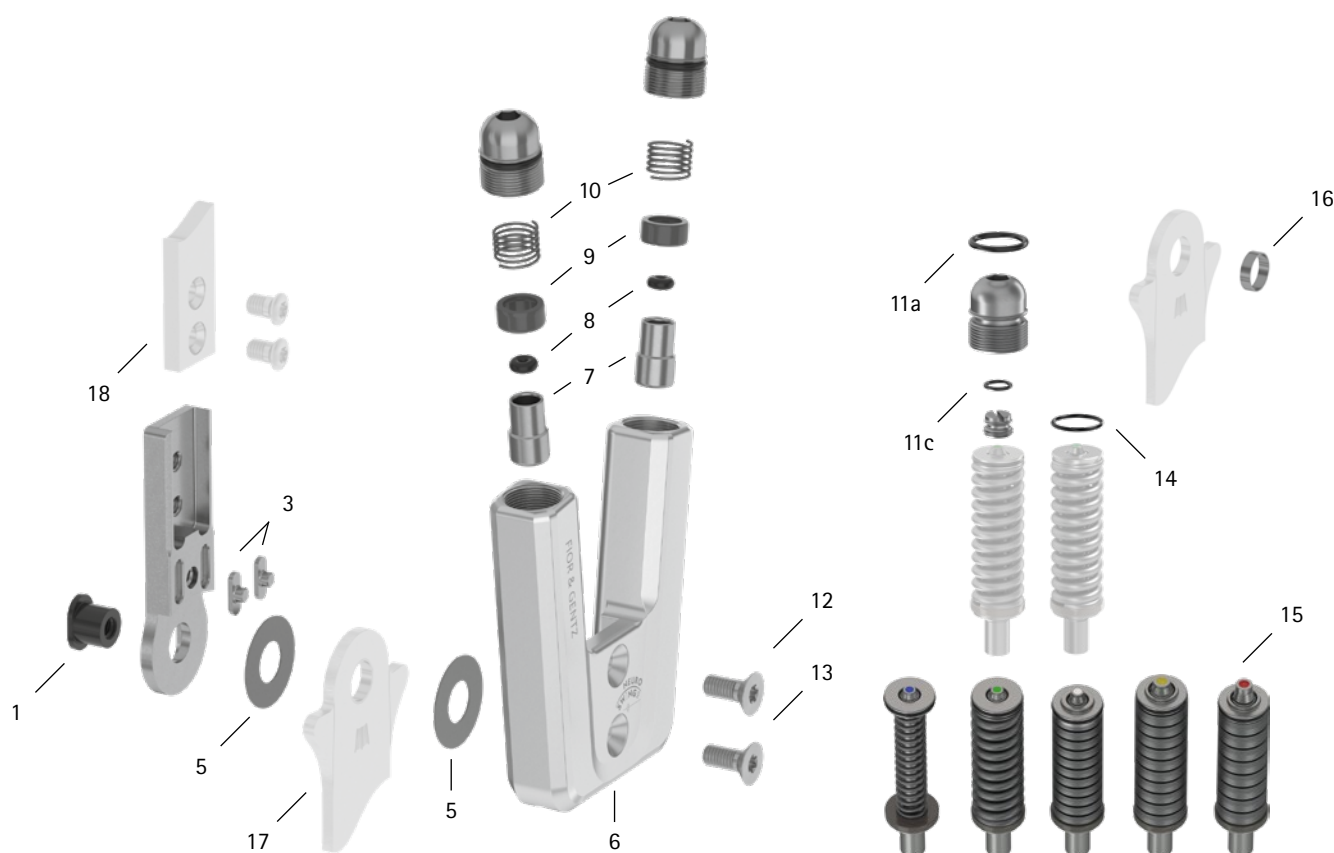

Pos.	10 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB6039-L0580	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	SF0390-01	linguetta di aggiustamento con perno	rottura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5	GS1206-040	dischetto di slittamento, Ø = 12 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5	GS1206-045					
5	GS1206-050					
5	GS1206-055					
5	GS1206-060					
6	SH0560-AL	piastra di copertura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
7	SH0490-01	pistone**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
8	PN0003-L02	ammortizzatore dell'arresto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	GS0604-350	boccola scorrevole**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
10	FE1615-01	molla a compressione**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
11a	VE3771-06/11	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
11c	VE3771-03/10	O-ring per fissare la vite di limitazione del movimento**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
12	SC1403-L08	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
13	SC1403-L08	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
6-13	SH5970-AL	unità funzionale modularità plug + go***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi

Commissione del paziente/ID della configurazione _____



Pos.	10 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Unità elastiche						
14	VE3771-045/10	O-ring per fissare l'unità elastica	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
15	SH5800-15/02	unità elastica, blu, normale, mobilità max. 15°	usura spostamento delle molle a tazza rumori dell'unità elastica	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
15	SH5800-15/04	unità elastica, verde, media, mobilità max. 15°		riallineare le molle a tazza con una pinza		
15	SH5800-10/06	unità elastica, bianca, forte, mobilità max. 10°		lubrificare l'unità elastica con olio lubrificante (codice art. FT3000-15)		
15	SH5800-10/09	unità elastica, gialla, molto forte, mobilità max. 10°				
15	SH5800-05/17	unità elastica, rossa, ultra forte, mobilità max. 5°				
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
16	BP0706-L020	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
17	vedere il catalogo	staffa per piede modulare	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
18	vedere il catalogo	ancoraggio modulare e stecca modulare	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione di prodotti su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente