


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

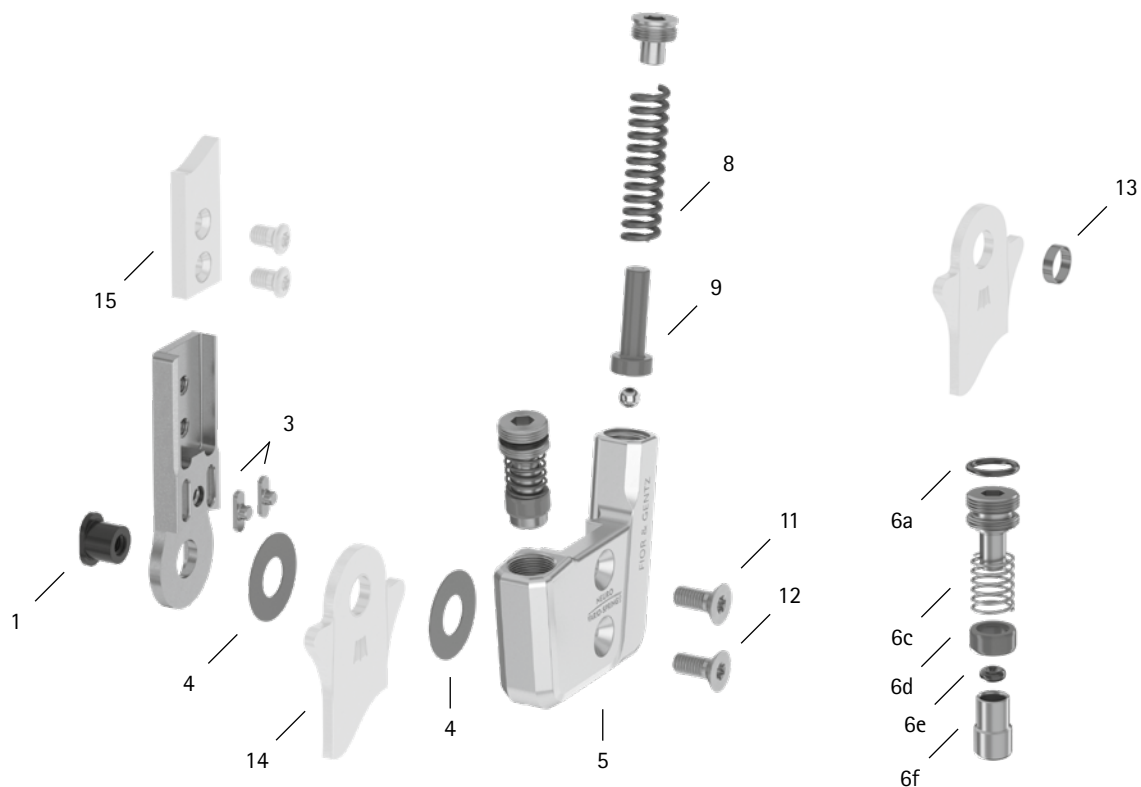

Pos.	12 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB7049-L0590	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	SF0391-01	linguetta di aggiustamento con perno	rottura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
4	GS1407-040	dischetto di slittamento, Ø = 14 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
4	GS1407-045					
4	GS1407-050					
4	GS1407-055					
4	GS1407-060					
5	SF0861-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5	SF0861-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale**				
6a	VE3771-050/10	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6c	FE1611-01	molla a compressione**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6d	GS0705-525	boccola scorrevole**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6e	PN0004-L02	ammortizzatore dell'arresto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6f	SH0491-01	pistone**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
8	FE1734-01	molla a compressione, dorata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	SF0841-07	bullone**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
11	SC1404-L10	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
12	SC1404-L10	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
5-12	SF8971-L/AL	unità funzionale modularità plug + go, sinistra laterale o destra mediale***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5-12	SF8971-R/AL	unità funzionale modularità plug + go, sinistra mediale o destra laterale***				
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
13	BR0807-L020	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
14	vedere il catalogo	staffe per piede modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
15	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente