


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

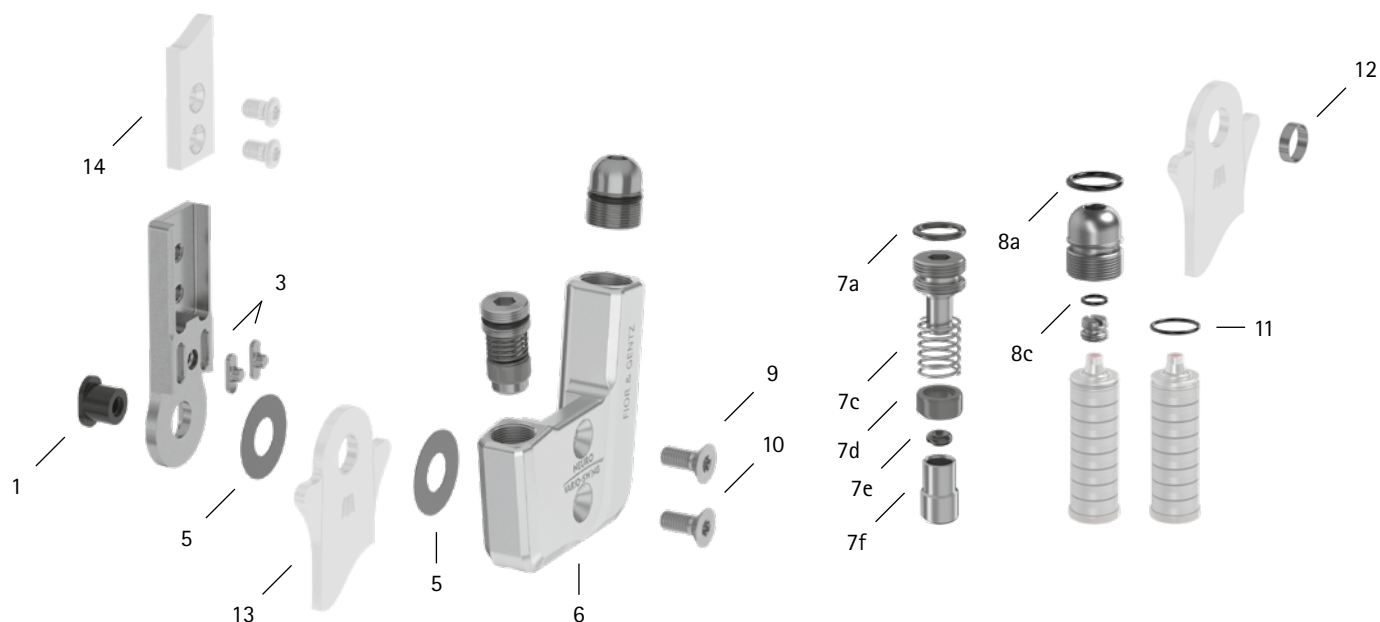

Pos.	12 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB7049-L0590	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	SF0391-01	linguetta di aggiustamento con perno	rottura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5	GS1407-040	dischetto di slittamento, Ø = 14 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5	GS1407-045					
5	GS1407-050					
5	GS1407-055					
5	GS1407-060					
6	SH0461-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6	SH0461-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale**				
7a	VE3771-050/10	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7c	FE1611-01	molla a compressione**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7d	GS0705-525	boccola scorrevole**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7e	PN0004-L02	ammortizzatore dell'arresto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7f	SH0491-01	pistone**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
8a	VE3771-08/15	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
8c	VE3771-04/10	O-ring per fissare la vite di limitazione del movimento**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	SC1404-L10	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
10	SC1404-L10	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
6-10	SH4971-L/AL	unità funzionale modularità plug + go, sinistra laterale o destra mediale***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6-10	SH4971-R/AL	unità funzionale modularità plug + go, sinistra mediale o destra laterale***				

Commissione del paziente/ID della configurazione _____



Pos.	12 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Unità elastiche						
11	VE3771-06/10	O-ring per fissare l'unità elastica	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
-	SF5801-15/03	unità elastica, blu, normale, mobilità max. 15°	usura spostamento delle molle a tazza rumori dell'unità elastica	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
-	SF5801-15/06	unità elastica, verde, media, mobilità max. 15°		riallineare le molle a tazza con una pinza		
-	SF5801-10/12	unità elastica, bianca, forte, mobilità max. 10°		lubrificare l'unità elastica con olio lubrificante (codice art. FT3000-15)		
-	SF5801-10/19	unità elastica, gialla, molto forte, mobilità max. 10°				
-	SF5801-05/33	unità elastica, rossa, ultra forte, mobilità max. 5°				
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
12	BR0807-L020	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
13	vedere il catalogo	staffe per piede modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
14	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente