


Commissione del paziente/ID della configurazione \_\_\_\_\_

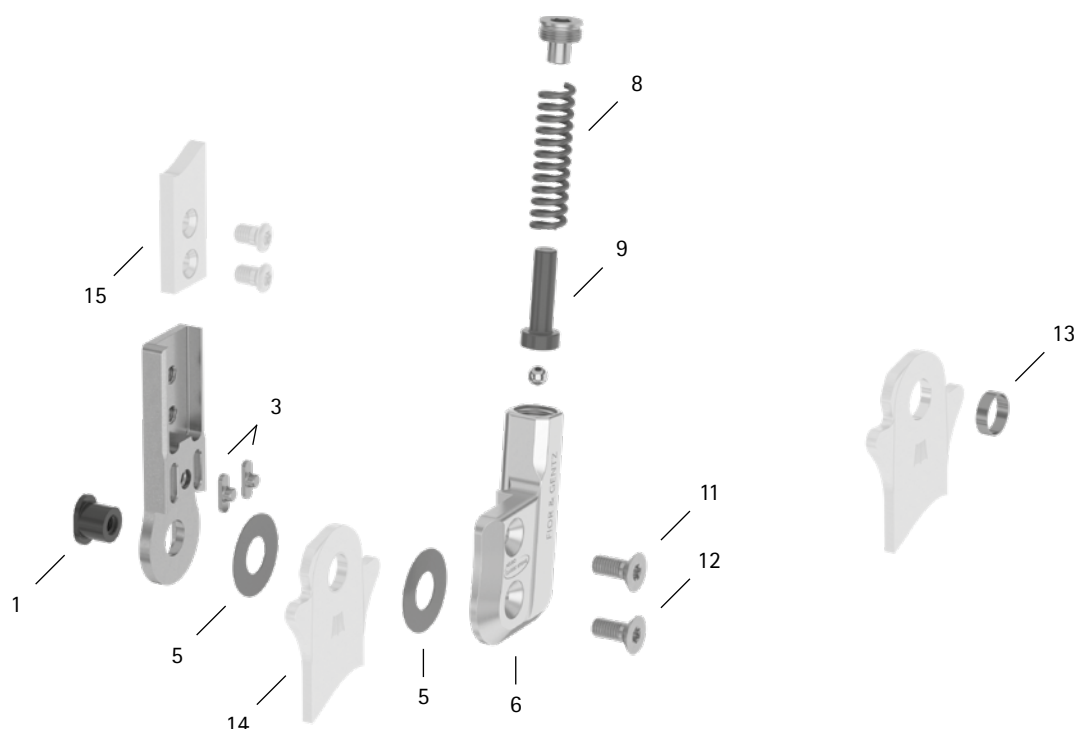

| Pos.                                                             | 14 mm              | Descrizione                                                                  | Possibile problema         | Misura     | Controllo raccomandato, event. sostituzione* | Sostituzione successiva dopo |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Articolazione modulare                                           |                    |                                                                              |                            |            |                                              |                              |
| 1                                                                | SB8559-L0630       | dado testa ovale                                                             | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 3                                                                | SF0392-02          | linguetta di aggiustamento con perno                                         | rottura                    | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 5                                                                | GS2009-040         | dischetto di slittamento, Ø = 20 mm                                          | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 5                                                                | GS2009-045         |                                                                              |                            |            |                                              |                              |
| 5                                                                | GS2009-050         |                                                                              |                            |            |                                              |                              |
| 5                                                                | GS2009-055         |                                                                              |                            |            |                                              |                              |
| 5                                                                | GS2009-060         |                                                                              |                            |            |                                              |                              |
| 6                                                                | SF0762-L/AL        | piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale**                   | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 6                                                                | SF0762-R/AL        | piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale**                   |                            |            |                                              |                              |
| 8                                                                | FE2736-01          | molla a compressione, dorata**                                               | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 9                                                                | SF0842-08          | bullone**                                                                    | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 11                                                               | SC1405-L11         | vite a testa svasata con cava esalobata**                                    | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 12                                                               | SC1405-L11         | vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**                   |                            |            |                                              |                              |
| 6-12                                                             | SF7972-L/AL        | unità funzionale modularità plug + go, sinistra laterale o destra mediale*** | perdita di funzione, usura | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 6-12                                                             | SF7972-R/AL        | unità funzionale modularità plug + go, sinistra mediale o destra laterale*** |                            |            |                                              |                              |
| Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare |                    |                                                                              |                            |            |                                              |                              |
| 13                                                               | BR1009-L025        | boccola scorrevole                                                           | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 14                                                               | vedere il catalogo | staffe per piede modulari                                                    | usura o rottura            | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 48 mesi                      |
| 15                                                               | vedere il catalogo | ancoraggi modulari e stecche modulari                                        | usura o rottura            | sostituire | ogni 6 mesi                                  | secondo necessità            |

\* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

\*\* parte integrante dell'unità funzionale

\*\*\* componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente

WP0039-IT-2023-01