


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

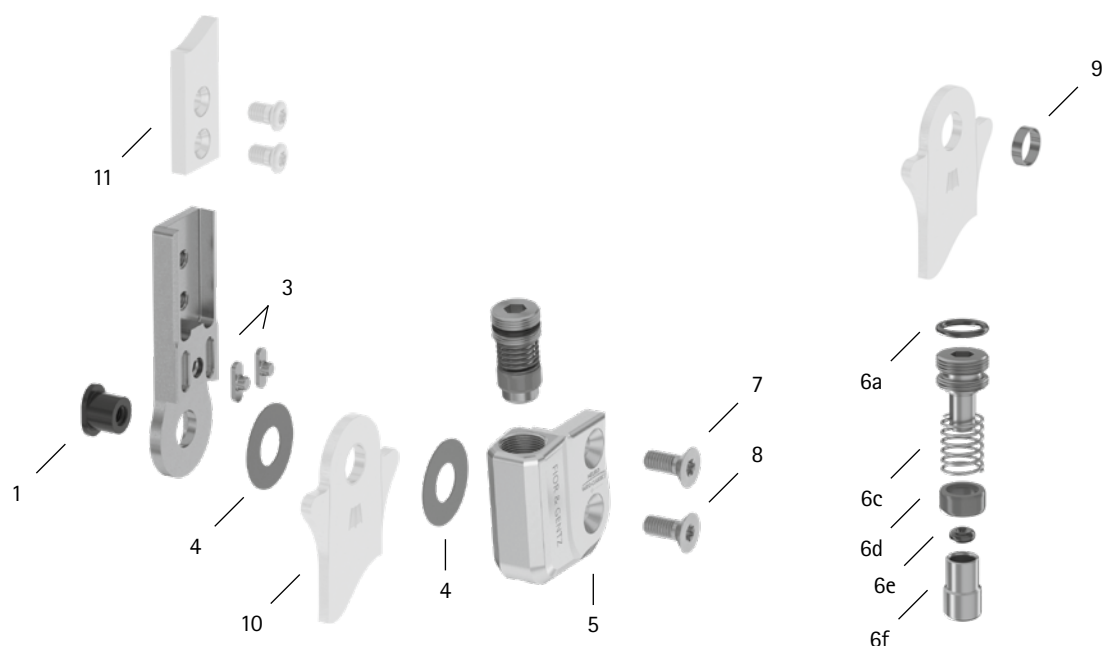

Pos.	14 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB8559-L0630	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	SF0392-02	linguetta di aggiustamento con perno	rottura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
4	GS2009-040	dischetto di slittamento, Ø = 20 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
4	GS2009-045					
4	GS2009-050					
4	GS2009-055					
4	GS2009-060					
5	SH0662-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5	SH0662-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale**				
6a	VE3771-08/15	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6c	FE1916-01	molla a compressione**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6d	GS1007-350	boccola scorrevole**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6e	VE3771-010/20	O-ring ammortizzatore**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6f	SH0492-01	pistone**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
7	SC1405-L11	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
8	SC1405-L11	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
5-8	SH6972-L/AL	unità funzionale modularità plug + go, sinistra laterale o destra mediale***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5-8	SH6972-R/AL	unità funzionale modularità plug + go, sinistra mediale o destra laterale***				
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
9	BR1009-L025	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
10	vedere il catalogo	staffe per piede modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
11	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente