


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

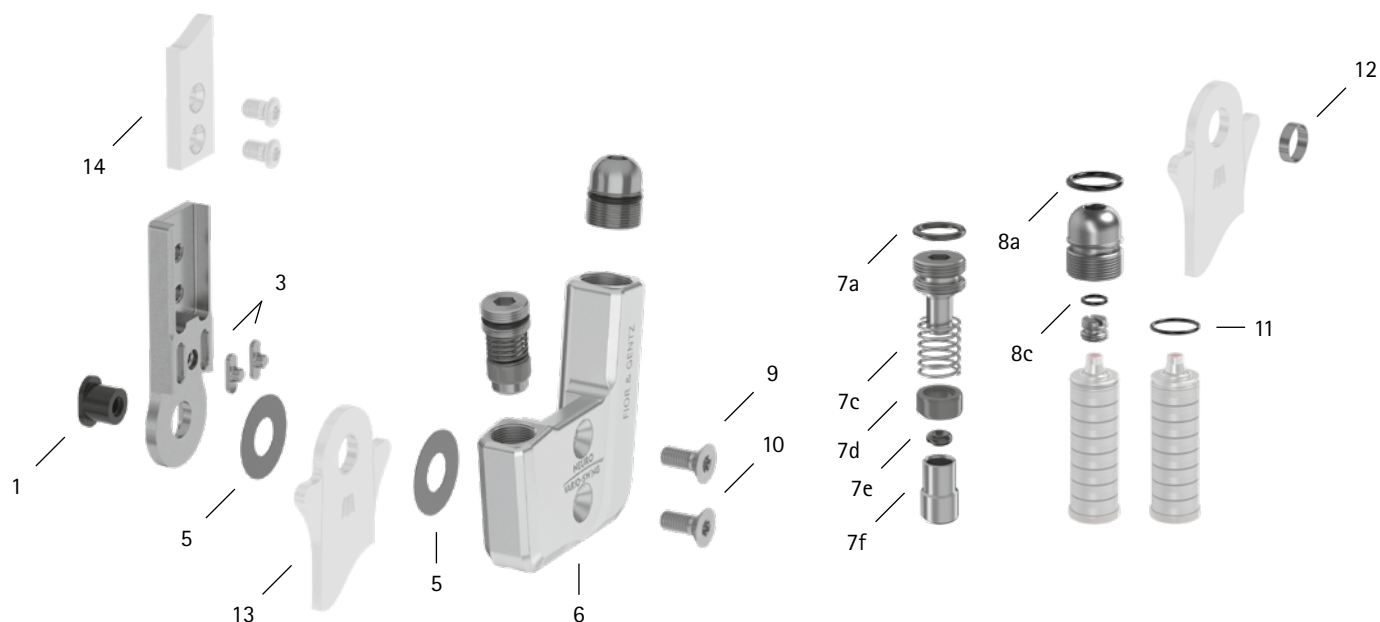

Pos.	14 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB8559-L0630	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	SF0392-02	linguetta di aggiustamento con perno	rottura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5	GS2009-040	dischetto di slittamento, Ø = 20 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5	GS2009-045					
5	GS2009-050					
5	GS2009-055					
5	GS2009-060					
6	SH0462-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6	SH0462-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale**				
7a	VE3771-08/15	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7c	FE1916-01	molla a compressione**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7d	GS1007-350	boccola scorrevole**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7e	VE3771-010/20	O-ring ammortizzatore**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7f	SH0492-01	pistone**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
8a	VE3771-09/15	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
8c	VE3771-04/10	O-ring per fissare la vite di limitazione del movimento**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	SC1405-L11	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
10	SC1405-L11	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
6-10	SH4972-L/AL	unità funzionale modularità plug + go, sinistra laterale o destra mediale***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6-10	SH4972-R/AL	unità funzionale modularità plug + go, sinistra mediale o destra laterale***				

Commissione del paziente/ID della configurazione _____



Pos.	14 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Unità elastiche						
11	VE3771-07/10	O-ring per fissare l'unità elastica	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
-	SF5802-15/05	unità elastica, blu, normale, mobilità max. 15°	usura spostamento delle molle a tazza rumori dell'unità elastica	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
-	SF5802-15/11	unità elastica, verde, media, mobilità max. 15°		riallineare le molle a tazza con una pinza		
-	SF5802-09/16	unità elastica, bianca, forte, mobilità max. 10°		lubrificare l'unità elastica con olio lubrificante (codice art. FT3000-15)		
-	SF5802-10/29	unità elastica, gialla, molto forte, mobilità max. 10°				
-	SF5802-05/53	unità elastica, rossa, ultra forte, mobilità max. 5°				
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
12	BR1009-L025	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
13	vedere il catalogo	staffe per piede modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
14	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente