


Commissione del paziente/ID della configurazione \_\_\_\_\_

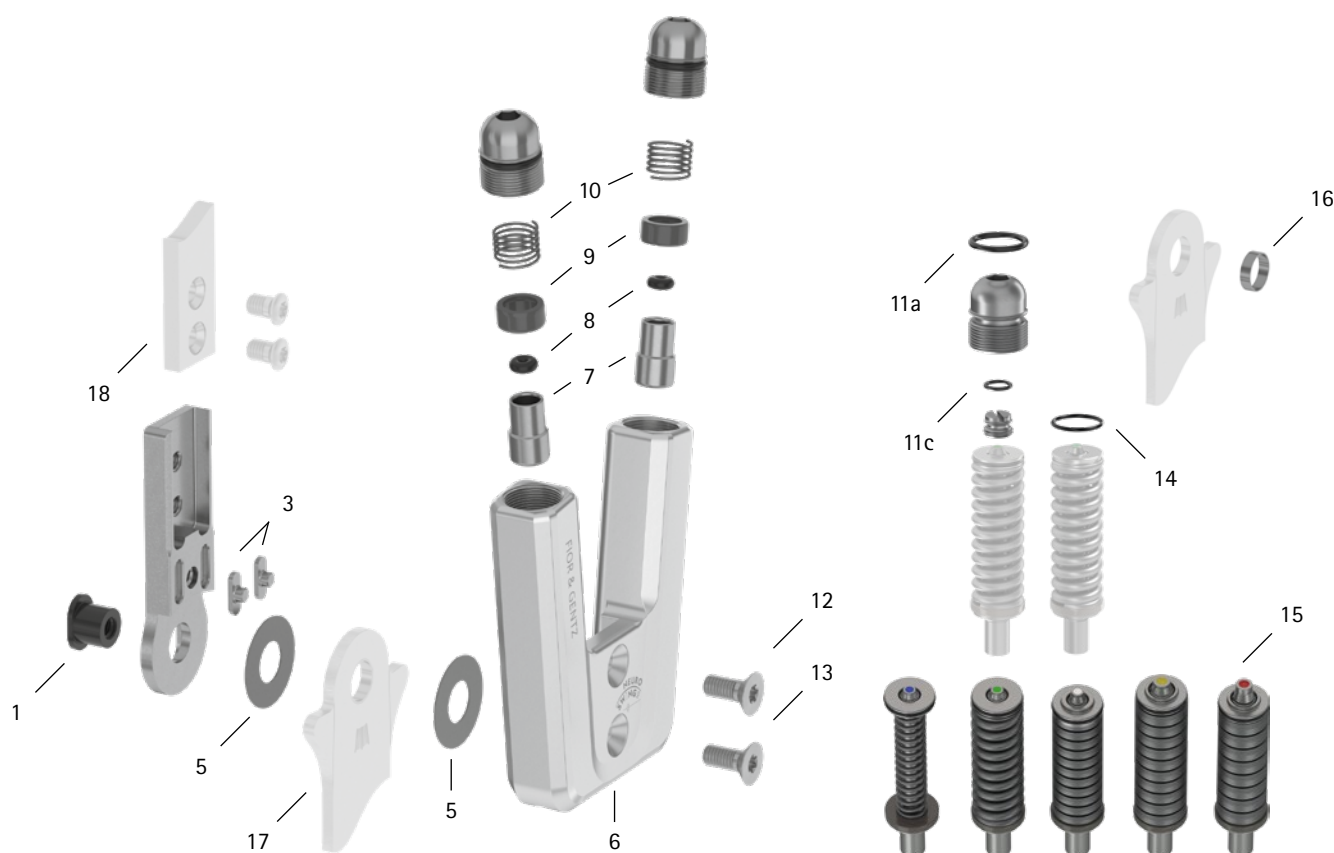

| Pos.                          | 16 mm         | Descrizione                                                 | Possibile problema         | Misura     | Controllo raccomandato, event. sostituzione* | Sostituzione successiva dopo |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Articolazione modulare</b> |               |                                                             |                            |            |                                              |                              |
| 1                             | SB9669-L0760  | dado testa ovale                                            | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 3                             | SF0393-02     | linguetta di aggiustamento con perno                        | rottura                    | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 5                             | GS2210-040    | dischetto di slittamento, Ø = 22 mm                         | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 5                             | GS2210-045    |                                                             |                            |            |                                              |                              |
| 5                             | GS2210-050    |                                                             |                            |            |                                              |                              |
| 5                             | GS2210-055    |                                                             |                            |            |                                              |                              |
| 5                             | GS2210-060    |                                                             |                            |            |                                              |                              |
| 6                             | SH0563-AL     | piastra di copertura**                                      | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 7                             | SH0493-01     | pistone**                                                   | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 8                             | VE3771-012/26 | O-ring ammortizzatore**                                     | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 9                             | GS1108-500    | boccola scorrevole**                                        | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 10                            | FE1027-01     | molla a compressione**                                      | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 11a                           | VE3771-11/15  | O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura** | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 11c                           | VE3771-04/10  | O-ring per fissare la vite di limitazione del movimento**   | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 12                            | SC1405-L12    | vite a testa svasata con cava esalobata**                   | usura                      | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 13                            | SC1405-L12    | vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**  |                            |            |                                              |                              |
| 6-13                          | SH5973-AL     | unità funzionale modularità plug + go***                    | perdita di funzione, usura | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |

Commissione del paziente/ID della configurazione \_\_\_\_\_



| Pos.                                                                    | 16 mm              | Descrizione                                            | Possibile problema                                                             | Misura                                                                     | Controllo raccomandato, event. sostituzione* | Sostituzione successiva dopo |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Unità elastiche</b>                                                  |                    |                                                        |                                                                                |                                                                            |                                              |                              |
| 14                                                                      | VE3771-08/10       | O-ring per fissare l'unità elastica                    | usura                                                                          | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 15                                                                      | SH5803-15/07       | unità elastica, blu, normale, mobilità max. 15°        | usura<br><br>spostamento delle molle a tazza<br><br>rumori dell'unità elastica | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 15                                                                      | SH5803-15/15       | unità elastica, verde, media, mobilità max. 15°        |                                                                                | riallineare le molle a tazza con una pinza                                 |                                              |                              |
| 15                                                                      | SH5803-10/21       | unità elastica, bianca, forte, mobilità max. 10°       |                                                                                | lubrificare l'unità elastica con olio lubrificante (codice art. FT3000-15) |                                              |                              |
| 15                                                                      | SH5803-10/31       | unità elastica, gialla, molto forte, mobilità max. 10° |                                                                                |                                                                            |                                              |                              |
| 15                                                                      | SH5803-05/63       | unità elastica, rossa, ultra forte, mobilità max. 5°   |                                                                                |                                                                            |                                              |                              |
| <b>Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare</b> |                    |                                                        |                                                                                |                                                                            |                                              |                              |
| 16                                                                      | BR1110-L030        | boccola scorrevole                                     | usura                                                                          | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 17                                                                      | vedere il catalogo | staffa per piede modulare                              | usura o rottura                                                                | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | 48 mesi                      |
| 18                                                                      | vedere il catalogo | ancoraggio modulare e stecca modulare                  | usura o rottura                                                                | sostituire                                                                 | ogni 6 mesi                                  | secondo necessità            |

\* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione di prodotti su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

\*\* parte dell'unità funzionale

\*\*\* componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente