


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

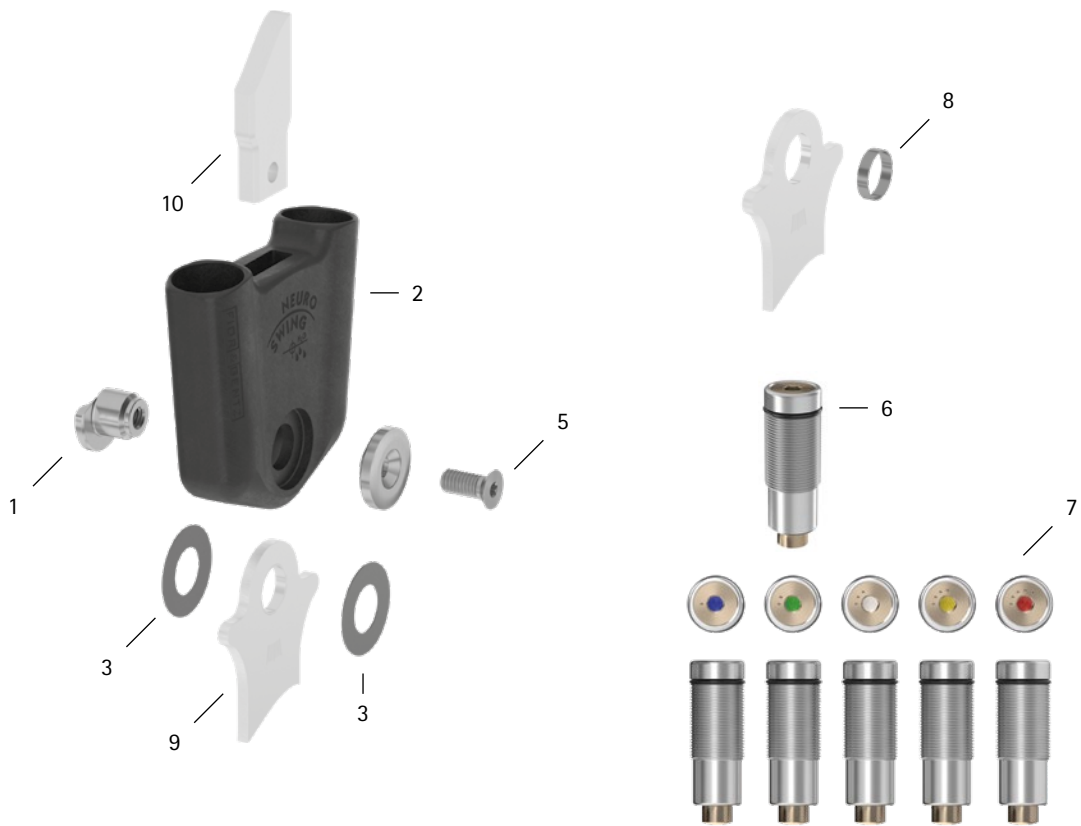

Pos.	14 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SF0592-C/1	dado testa ovale	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
2	SF0502-C	alloggiamento dell'articolazione	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
3	GS1911-040	dischetto di slittamento, Ø = 19 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
3	GS1911-045					
3	GS1911-050					
3	GS1911-055					
3	GS1911-060					
5	SC1405-L11	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
Unità elastiche						
6	VE3771-100/12	O-ring per fissare l'unità elastica	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7	SF5802-C/15/05	unità elastica, blu, normale, mobilità max. 15°	usura rumori dell'unità elastica	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7	SF5802-C/15/11	unità elastica, verde, media, mobilità max. 15°				
7	SF5802-C/09/16	unità elastica, bianca, forte, mobilità max. 10°				
7	SF5802-C/10/29	unità elastica, gialla, molto forte, mobilità max. 10°				
7	SF5802-C/05/53	unità elastica, rossa, ultra forte, mobilità max. 5°				
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
8	BR1211-L025	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	vedere il catalogo	staffa per piede modulare	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
10	vedere il catalogo	ancoraggio modulare e stecca modulare	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
-	-	collegamento tramite colla (stecca/l'ancoraggio modulare e articolazione modulare)	rottura	incollare nuovo componente modulare in carbonio	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione di prodotti su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente