


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

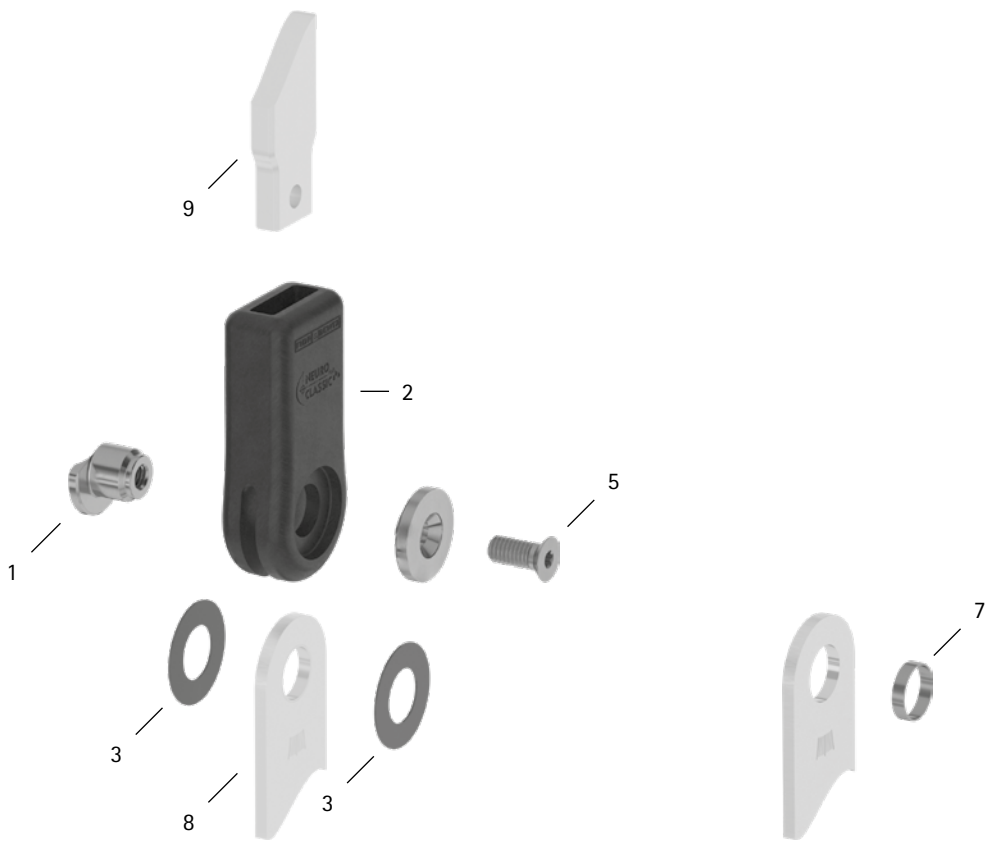

Pos.	16 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SF0593-C/1	dado testa ovale	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
2	SF0103-C	alloggiamento dell'articolazione	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
3	GS2413-040	dischetto di slittamento, Ø = 24 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
3	GS2413-045					
3	GS2413-050					
3	GS2413-055					
3	GS2413-060					
5	SC1406-L14	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
7	BR1312-L030	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
8	vedere il catalogo	staffa per piede modulare	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
9	vedere il catalogo	ancoraggio modulare e stecca modulare	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
-	-	collegamento tramite colla (stecca/l'ancoraggio modulare e articolazione modulare)	rottura	incollare nuovo componente modulare in carbonio	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione di prodotti su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente