


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

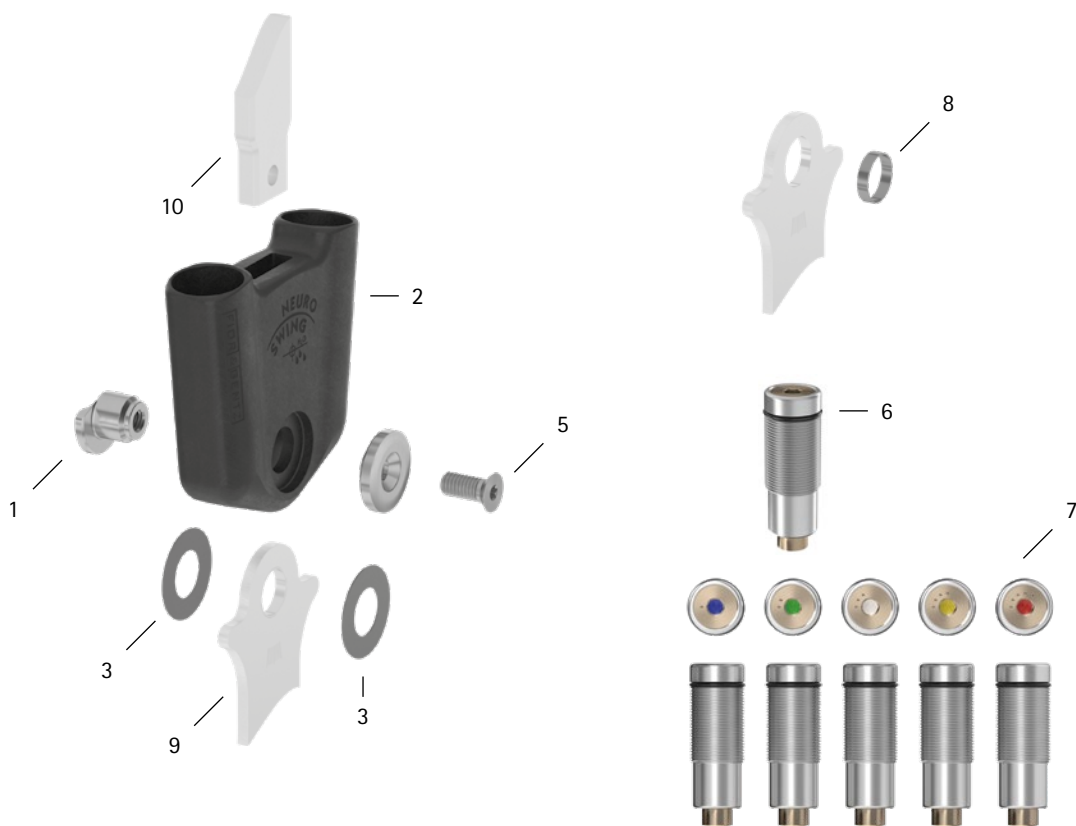

Pos.	10 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SF0590-C/1	dado testa ovale	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
2	SF0500-C	alloggiamento dell'articolazione	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
3	GS1207-040	dischetto di slittamento, Ø = 12 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
3	GS1207-045					
3	GS1207-050					
3	GS1207-055					
3	GS1207-060					
5	SC1403-L08	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
Unità elastiche						
6	VE3771-070/12	O-ring per fissare l'unità elastica	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7	SF5800-C/15/02	unità elastica, blu, normale, mobilità max. 15°	usura rumori dell'unità elastica	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7	SF5800-C/15/04	unità elastica, verde, media, mobilità max. 15°				
7	SF5800-C/10/06	unità elastica, bianca, forte, mobilità max. 10°				
7	SF5800-C/10/09	unità elastica, gialla, molto forte, mobilità max. 10°				
7	SF5800-C/05/17	unità elastica, rossa, ultra forte, mobilità max. 5°				
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
8	BR0807-L020	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	vedere il catalogo	staffa per piede modulare	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
10	vedere il catalogo	ancoraggio modulare e stecca modulare	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
-	-	collegamento tramite colla (stecca/l'ancoraggio modulare e articolazione modulare)	rottura	incollare nuovo componente modulare in carbonio	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione di prodotti su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente