

Azienda: ..... Codice cliente: .....  
 Tecnico ortopedico: ..... Data: .....  
 Paziente: ..... Assicurazione sanitaria: .....

**Il protocollo per la verifica della funzione dell'ortesi viene eseguita:**

per l'ortesi attuale, terminata in data: .....  
 in seguito a una manutenzione, eseguita in data: .....  
 per pianificare una nuova ortesi.  
 per consegnare una nuova ortesi, terminata in data: .....

## 1. Dati dell'ortesi

	AFO	KAFO	KO	Ortoprotesi
Parte del piede:	corta	lunga e parzialmente flessibile	lunga e rigida	
Articolazione tibiotarsica:	laterale	mediale		
	NEURO .....	NEURO .....		
	nessuna articolazione tibiotarsica	nessuna articolazione tibiotarsica		
	altro .....	altro .....		
Articolazione per ginocchio:	laterale	mediale		
	NEURO .....	NEURO .....		
	stecca articolare KS .....	stecca articolare KS .....		
	nessuna articolazione per ginocchio	nessuna articolazione per ginocchio		
	altro .....	altro .....		
L'ortesi corrisponde alla raccomandazione della configurazione?	sì	parzialmente	no	

## 2. Controllo della struttura dell'ortesi sul banco da lavoro

❗ Per le seguenti sezioni, posizionare l'ortesi nella scarpa.

2.1 La lunghezza della parte del piede dell'ortesi corrisponde alla lunghezza interna della scarpa.

sì no

2.2 Il rialzo della parte del piede e della scarpa coincidono.

sì no

2.3 La distanza punta-suolo è considerata correttamente.

sì no

❗ Esaminare la struttura dell'ortesi dal lato. Se necessario, tenere l'ortesi nella posizione mostrata a destra e controllare le battute.

2.4 La struttura dell'ortesi corrisponde all'immagine.


sì no

2.5 Le battute di tutte le articolazioni vengono raggiunte.

sì no



Tutorial online

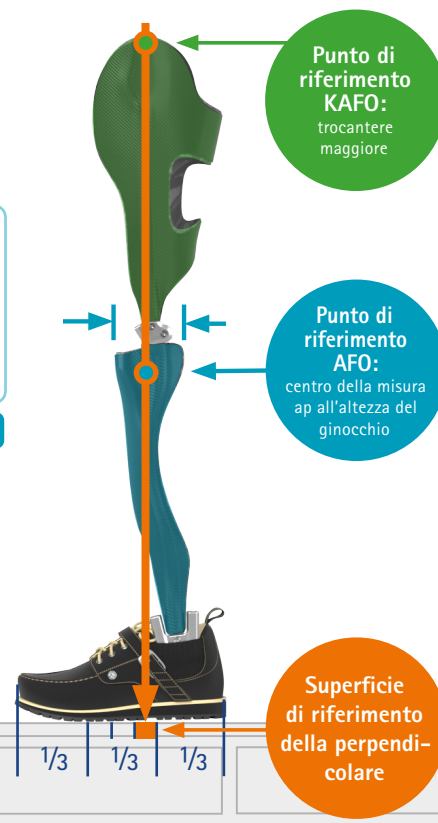

## 3. Controllo della struttura dell'ortesi sul/sulla paziente: statico

3.1 Secondo la configurazione viene raccomandata una battuta dorsale.

sì                  no                  non noto

3.2 Viene eseguita un'analisi visiva della posizione eretta.

sì    no

senza ulteriore ausilio                  Motivazione: .....

con ulteriori ausili    .....

Ⓛ Per le seguenti sezioni, assicurarsi che il/la paziente sia in posizione eretta e che indossi l'ortesi e le scarpe adeguate.


3.3 È possibile spostare il peso da una gamba all'altra.

sì                  verso il sì                  verso il no                  no

Motivazione: .....

.....

3.4 È molto probabile che il/la paziente assuma le seguenti posizioni (sono possibili più risposte):

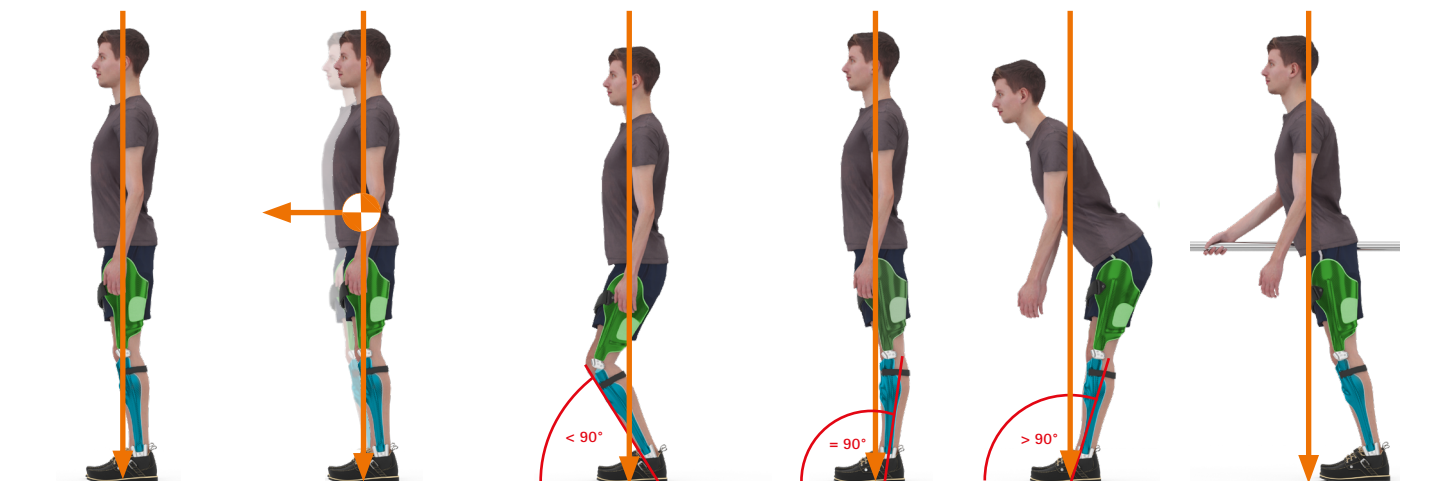

È possibile rimanere in posizione eretta senza ulteriore appoggio	È possibile posizionare il baricentro del corpo in avanti	Angolo parte inferiore della gamba-suolo troppo piccolo	Angolo parte inferiore della gamba-suolo troppo grande	Ausilio necessario
---	---	---	--	--------------------

3.5 Le battute nella posizione indicata al punto 3.4 vengono raggiunte.

Articolazione tibiotarsica: la battuta dorsale viene raggiunta.

sì                  no                  battuta dorsale assente

Articolazione per ginocchio: l'arresto di estensione viene raggiunto.

sì                  no                  arresto di estensione assente



ⓘ Per le seguenti sezioni osservare sempre i molteplici sviluppi dei passi. Valutare se e con quale frequenza queste affermazioni sono corrette.

### 4.3 Analisi della deambulazione: piede

Il suolo viene toccato per prima con il tallone.

- sempre                      quasi sempre
- qualche volta            mai

Motivazione: .....



Si assiste a una flessione plantare (passiva).

- sempre                      quasi sempre
- qualche volta            mai

Motivazione: .....



Il contatto del piede è completo.

- sempre                      quasi sempre
- qualche volta            mai

Motivazione: .....



Si verifica un'estensione dorsale.

- |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| sempre                         | quasi sempre                   | qualche volta                  |
| <input type="radio"/> circa 5° | <input type="radio"/> circa 5° | <input type="radio"/> circa 5° |
| <input type="radio"/> > 5°     | <input type="radio"/> > 5°     | <input type="radio"/> > 5°     |
| mai                            |                                |                                |


Motivazione: .....



Il tallone si stacca dal suolo in modo evidente:

- sempre                      quasi sempre
- qualche volta            mai

Motivazione: .....

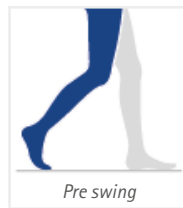

### 4.4 Analisi della deambulazione: ginocchio

L'articolazione del ginocchio è...

- flessa e l'angolo                      iperestesa.
- è pari a...
- circa 15°.
- < 10°       > 20°.

Motivazione: .....

L'articolazione del ginocchio è...

- flessa..                                      iperestesa.

Motivazione: .....

L'articolazione del ginocchio è...

- flessa.                                      iperestesa.

Motivazione: .....

L'articolazione del ginocchio raggiunge un angolo di flessione di...

- circa 0°                      circa 5°.
- < 0°                              > 5°.

Motivazione: .....

Si verifica un movimento di flessione nell'articolazione del ginocchio.

- sempre                      quasi sempre
- qualche volta            mai

Motivazione: .....

L'articolazione del ginocchio raggiunge un angolo di flessione di...

- circa 60°.
- < 60°                              > 60°.

Motivazione: .....

L'articolazione del ginocchio raggiunge un angolo di flessione di...

- circa 0°.
- < 0°                              > 0°.

Motivazione: .....