

Il configuratore ortesico

FIOR & GENTZ



Configuratore
ortesico



 Il lavoro ripartito del futuro

 Tassello fondamentale per il vostro trattamento ortesico documentato

4 FASI

PER REALIZZARE L'ORTESI IDEALE DOCUMENTATA

1

Dati del paziente

Nella prima fase inserite tutti i dati del paziente specifici dell'indicazione e rilevanti per la pianificazione della vostra ortesi. I concetti e i moduli di trattamento vi aiutano in questa fase.

Vi aiutiamo a progettare l'ortesi migliore per il vostro paziente.



2

Aspetto dell'ortesi e componenti modulari

Nella seconda fase riceverete proposte in merito all'aspetto dell'ortesi e ai componenti modulari. Le proposte sono adattate funzionalmente ai dati del paziente e determinate in base alle sollecitazioni previste.


Cliccando su un pulsante info ⓘ contrassegnato, ricevete informazioni di base e conoscenze specifiche sulle singole richieste che vi aiutano a fare la scelta giusta.

3

Adattamenti individuali

Nella terza fase è possibile eseguire degli adattamenti individuali (ad es. forma e materiale).

Con il configuratore ortesico ottenete una trasparenza completa di trattamento per tutte le parti coinvolte (paziente, dottore, fisioterapista, assicurazione sanitaria, colleghi ecc.) perchè l'ortesi progettata individualmente viene documentata in ogni minimo dettaglio.

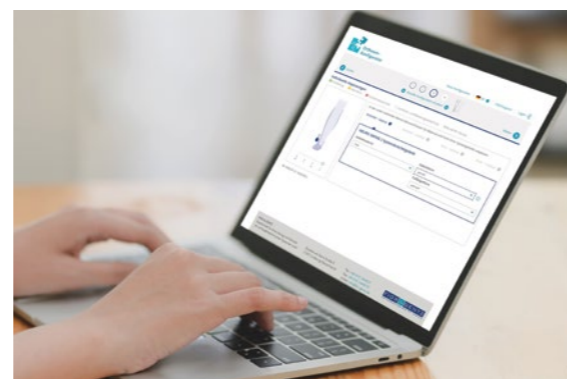

4

Risultato


Qui il risultato della configurazione può essere salvato, inviato e stampato per la documentazione clinica. Inoltre è possibile realizzare una proposta di preventivo e ordinare i prodotti selezionati tramite il nostro shop online.

Con il configuratore ortesico è possibile realizzare un'ortesi riproducibile e documentata – un tassello fondamentale per il vostro trattamento ortesico.

DOCUMENTAZIONE DEI TUTORIAL

IL LAVORO RIPARTITO DEL FUTURO

Uno scenario ideale sarebbe quello in cui un tecnico ortopedico accompagna l'intero processo di realizzazione dell'ortesi, dalla pianificazione fino alla consegna. Tuttavia una tale procedura non è sempre praticabile nella realtà. Con la raccolta dei tutorial online molte persone possono lavorare su un'ortesi e tutti riescono a tracciare in ogni momento quali fasi di lavoro dei colleghi sono state eseguite prima e dopo.

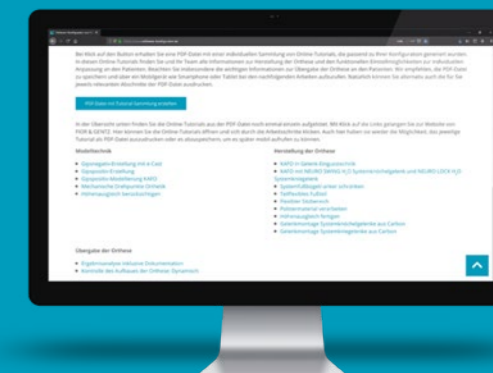

Qui è descritto un potenziale processo:

Il collega 1 segue le istruzioni di lavoro fino alla tecnica di modellazione.

Il collega 2 si occupa della realizzazione dell'ortesi. Successivamente passa il lavoro al collega che ha realizzato la pianificazione e che segue le istruzioni di lavoro dai tutorial online fino alla consegna dell'ortesi. In questo modo il collega 1 può fornire a tutto lo staff che si occupa del trattamento clinico del paziente una documentazione completa delle fasi di lavoro necessarie.


Tramite il „Protocollo per la verifica della funzione dell'ortesi“ la qualità del trattamento ortesico può essere verificata e documentata.

SISTEMA RIPRODUCIBILE GRAZIE ALLA DOCUMENTAZIONE

La raccolta dei tutorial online permette non solo una suddivisione del lavoro efficiente, ma assicura anche che l'ortesi finale sia riproducibile perchè tutti i processi sono documentati nel documento in formato PDF. In ogni momento è possibile accedere di nuovo alla configurazione inserendo i propri dati utente e generare nuovamente il documento PDF.



www.orthosis-configurator.com/it

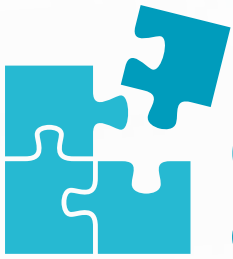

Configuratore orteseico



www.orthosis-configurator.com/it